

Wenn Sie Hilfe brauchen, schicken Sie eine E-Mail an help@moocall.com, chatten Sie mit uns auf www.moocall.com oder rufen Sie uns an 0322 2109 5533 (Deutschland)



Schritt 1: Aktivieren Sie Ihren Moocall-Abkalbesensor

- Gehen Sie auf www.moocall.com/register und geben Sie Ihre Daten ein.
- Wenn Sie keinen Internetzugang haben, rufen Sie uns an.
- Wenn der Sensor nicht aktiviert wurde, schaltet er sich sofort nach dem Einschalten wieder aus.

Schritt 2: Aufladen

- Lösen Sie den roten Gummi. Drücken Sie mit einem Schlitzschraubendreher auf die Nische mit den Punkten.
- Entfernen Sie die Ladekappe und stecken Sie das Ladekabel ein.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ersetzen Sie die Aufladeabdeckung und bringen Sie das Gummipad wieder um die Ladeabdeckung herum an.
- WICHTIG: Die Ladekappe sollte nur abgenommen werden, wenn das Gerät geladen wird.
- Drücken Sie das USB-Kabel NICHT zu stark in den Ladeanschluss des Sensors.

Schritt 3: Einschalten

- Drücken Sie die Taste und halten Sie sie fünf Sekunden lang gedrückt.
- Die LED-Anzeige des Sensors wird in verschiedenen Farben blinken und sich dann auf blau blinken (etwa alle 5 Sekunden) einstellen, was anzeigt, dass der Sensor eingeschaltet und aktiv ist
- Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Taste zehn Sekunden lang gedrückt, bis ein rosa Licht aufleuchtet.
- Wenn sich der Sensor selbst ausschaltet, nachdem er in mehreren Farben geblinkt hat, muss er aktiviert werden oder es liegt ein Netzwerkproblem vor. Bitte kontaktieren Sie Moocall.

Schritt 4: Sensor testen

- Bitte führen Sie diesen Test in dem Umfeld durch, in dem der Sensor verwendet wird, um sicherzustellen, dass die Netzwerkabdeckung für den Sensor ausreichend ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Sensor eingeschaltet ist und das blaue Licht blinkt.
- Drücken Sie die Taste eine halbe Sekunde lang fest. Lassen Sie los und drücken Sie die Taste sofort wieder.
- Sie müssen die Taste zweimal innerhalb von drei Sekunden drücken. Dies kann mehrere Versuche erfordern.
- Wenn Sie es richtig gemacht haben, beginnt der Sensor grün zu blinken.
- Sie sollten eine SMS an alle mit dem Sensor verbundenen Nummern, eine E-Mail und eine Benachrichtigung in der Moocall-App erhalten.
- Wenn Sie innerhalb von zehn Minuten nach dem Blinken des grünen Lichts keine Nachricht erhalten, kontaktieren Sie uns.

Schritt 5: Bringen Sie den Sensor am Schwanz an

- Bringen Sie den Sensor am Schwanz einer Kuh an, die bald abkalben wird. Der Sensor sollte am Schwanz auf Höhe der Scheide angebracht werden.
- Führen Sie den Zahnriemen in die Ratsche ein. Schließen Sie die Ratsche und klicken Sie auf die Klappe um diese zu schliessen.
- Ziehen Sie den Zahnriemen handfest an, bis der Sensor fest am Schwanz der Kuh sitzt.
- Versichern Sie sich, dass der Sensor fest am Schwanz sitzt, indem Sie die Sitzfestigkeit testen.
- Der Sensor sollte sich noch von Seite zu Seite drehen lassen, darf aber nicht herunterrutschen, wenn Sie ihn leicht nach unten ziehen.
- Passen Sie die Spannung des Riemens nach Bedarf an, bis eine gute Festigkeit erreicht ist.
- WICHTIG! NICHT ZU ENG ANBRINGEN!
- Wenn der Sensor zu eng am Schwanz angebracht wird, erhalten Sie Fehlermeldungen und Sie können der Kuh irreparable Verletzungen zufügen!
- Das Gummipad kann je nach Stärke der Kuhschwänze in Ihrer Herde, passend zugeschnitten werden.
- Achten Sie darauf, dass die Gummieinlage am Heck nicht übersteht.
- Die Verwendung von Gummipads falscher Grösse kann zu Unannehmlichkeiten für das Tier und Fehlermeldungen vom Sensor führen.

Schritt 6: Zurücksetzen des Sensors

- Nach dem Abkalben einer Kuh, drücken Sie den Knopf eine Sekunde lang, um den Sensor zurückzusetzen.
- Die LED-Anzeige, die rot leuchtet, wird dann blau blinken und der Sensor ist nun bereit, an der nächsten
- Der Sensor wird nach einer Stunde automatisch zurückgesetzt, wenn er nicht manuell zurückgesetzt wird.
- WICHTIG: Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten ein und übergießen Sie es nicht mit Flüssigkeiten. Reinigen Sie es nur mit einem feuchten Tuch.

Fehlersuche

- Der Sensor fällt ab: Er muss fester eingestellt oder weiter oben angebracht werden, wo der Schwanz dicker ist.
- Mehr als zwei Kalbungsalarme pro Tier, Alarme mehr als zwei Stunden vor dem Kalben: Entweder überlappen sich die roten Gummis oder das Gerät ist zu fest eingestellt.
- Das Gerät schaltet sich nicht ein: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät aufgeladen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an uns.
- Der Sensor blinkt ständig in allen Farben und schaltet nie auf blaues Blinken um: Bitte kontaktieren Sie uns.

LED-statusanzeige

Blinkendes blaues Licht: Sensor eingeschaltet und betriebsbereit

Blinkendes orange Licht: Batteriestand niedrig

Grünes Dauerlicht: Batterie voll geladen

Rotes Dauerlicht: Abkalben im Vorgang

Blinkendes grünes Licht: Test im Vorgang

Blinkendes rotes und blaues Licht: Software wird aktualisiert

Alle Farben blinken: Sensor stellt Verbindung her