

Se avete bisogno di aiuto, inviate un'e-mail a help@moocall.com, chattate con noi su www.moocall.com o telefonateci al numero 02 94 75 08 95



Passo 1: Attivare il sensore per parto

- Vai sul sito www.moocall.com/register per completare l'attivazione.
- Se non hai accesso ad Internet, puoi contattarci per attivare il tuo dispositivo.
- Se il sensore non è stato attivato, si spegnerà subito dopo l'accensione.

Passo 2: Caricare il sensore

- Stacca la gomma rossa. Con un cacciavite a punta piatta, premi sulla nicchia con i punti.
- Rimuovi il coperchio di protezione della porta di carica e inserisci il cavo.
- Quando la carica è completa: toglì il cavo, chiudi il coperchio di protezione e risistema il rivestimento di gomma attorno al coperchio stesso.
- **IMPORTANTE:** Il coperchio di protezione della porta di carica deve essere staccato solo quando il dispositivo è in carica.
- **NON FARE FORZA NELL'INSERIRE IL CAVO NELLA PORTA!**

Passo 3: Accendere

- Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante per almeno 5 secondi.
- La luce del sensore si illuminerà ogni 5 secondi indicando che il sensore è attivo ed in funzione.
- Per spegnere il dispositivo, premi il pulsante per 10 secondi finché non si accende una luce rosa.
- Se il sensore si spegne da solo dopo aver lampeggiato in più colori, è necessario attivarlo o c'è un problema di rete. Contatta Moocall.

Passo 4: Test del sensore

- Ti raccomandiamo di effettuare il test per assicurarti ci sia rete nella zona in cui stai utilizzando il dispositivo.
- Assicurati che il sensore sia acceso e che la luce blu stia lampeggiando.
- Premi il pulsante in maniera decisa per mezzo secondo. Rilascia e subito dopo, premilo di nuovo.
- È necessario premere il pulsante due volte in tre secondi. Possono essere necessari diversi tentativi.
- Una volta eseguita correttamente l'operazione, il sensore inizierà a lampeggiare in verde.
- Si dovrebbe ricevere un SMS su tutti i numeri collegati al sensore, un'e-mail e una notifica dell'app Moocall.
- Se non ricevi un SMS entro 10 minuti dal lampeggiamento in verde, ti preghiamo di contattarci.

Passo 5: Posizionare il sensore sulla coda

- Posiziona il sensore sulla coda di una vacca che deve partorire. Il sensore deve essere posizionato sulla coda di fronte alla vulva.
- Inserisci la cinghia dentata nella fibbia. Chiudi la fibbia e spingi il fermaglio Moocall fino a sentire "clic".
- Tira l'estremità libera della cinghia dentata fino a quando il sensore è ben fissato sulla coda della vacca.
- Assicurarti che il sensore sia ben saldo sulla coda verificandone la posizione.
- Il sensore deve poter spostarsi leggermente da un lato all'altro della coda, ma non verso il basso.
- Regolare la tenuta della cinghia secondo la necessità, fino a quando non si è adeguatamente posizionato il dispositivo.
- **IMPORTANTE! NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE!**
- Se il sensore viene posizionato troppo stretto sulla coda della vacca, si genereranno falsi avvisi e si potrebbe causare un danno permanente e irreversibile all'animale!
- Il rivestimento in gomma può essere tagliato a misura in base alle dimensioni delle code delle vacche della tua mandria.
- Assicurarsi che il rivestimento in gomma non si sovrapponga alla coda.
- L'uso di una gomma di dimensioni sbagliate può infastidire l'animale e generare falsi avvisi del sensore.

Passo 6: Resetare il dispositivo

- Dopo un parto, premere il bottone per un secondo per resettare il sensore.
- La luce dovrebbe passare da rossa fissa a blu lampeggiante, ed a questo punto il sensore sarà pronto per essere utilizzato su un altro animale.
- Se non viene resettato manualmente, il sensore si resetta automaticamente dopo un'ora.
- **IMPORTANTE:** non immergere il dispositivo in liquidi e non passarci sopra liquidi. Pulire solo con un panno umido.

Risoluzione dei problemi

- Il sensore si stacca: Deve essere regolato più saldamente o posizionato più in alto, dove la coda è più spessa.
- Più di due avvisi di parto per animale, avvisi più di due ore prima del parto: la gomma rossa rosso si sovrappone o il dispositivo è regolato troppo stretto.
- Il dispositivo non si accende: Assicurati che il dispositivo sia stato caricato. Se il problema persiste, contattaci.
- Il sensore continua a lampeggiare in arcobaleno e non passa mai a lampeggiare in blu: Contatta Moocall.

Indicatore luminoso

Luce blu lampeggiante: Sensore acceso e pronto all'uso

Luce arancione lampeggiante: Batteria scarica

Luce verde continua: Batteria completamente carica

Luce rossa continua: Parto in corso

Luce verde lampeggiante: Test in corso

Luce rossa e blu lampeggiante: Aggiornamento software

Lampeggiano tutti i colori: Sensore si sta connettendo