



ADAPTARAP™

Brugsanvisning

Når det er besluttet, at der skal lægges en forbindelse, opnås det bedste resultat med ZINPRO ADAPTARAP ved at følge nedenstående trin.

Hvis der skal anvendes en sårbehandling, er den bedste praksis, at behandlingen holdes på plads med gaze. Dette er kritisk, hvis behandlingen er en spray, salve eller anden væske, som kan opløse ADAPTARAP for hurtigt.

Begynd med at lægge ADAPTARAP på samme måde som en traditionel fodbandage. Anvend et konstant tryk ved forbindelse af kloven, så luftrummet mellem lagene mindskes. Herved opnås en bedre vedhæftning. Den uelastiske forbindelse sikrer tæt tilslutning uden at øge risikoen for tryksår.

Undlad at lave flere 360-graders omviklinger om kloven efter hinanden uden forbindingen føres ind gennem klovspalten. Ellers vil det fremskynde selvpopløsningsprocessen. ADAPTARAP skal lægges rundt om ballen og op ad benets bagside til lige under biklovene for at forhindre, at forbindingen glider af i løbet af behandlingsperioden.

ADAPTARAP er designet til at blive siddende på kloven mellem to timer og fem dage, når den er lagt korrekt. Mindst to omviklinger, som dækker hver af de to baller er påkrævet for at opnå den mindste holdbarhed. Man kan forlænge holdbarheden ved at øge antallet af omviklinger og dermed længden af ADAPTARAP, der anvendes.

Når den ønskede mængde ADAPTARAP er lagt, skal forbindingsens endestykke fugtes med lidt vand og trykkes godt ind mod den øvrige forbindelse, så der dannes en forsegling. En sprayflaske er velegnet til let fugtning af forbindingen. I perioder med ekstremt lave temperaturer opnås det bedste resultat med varmt vand.