



ADAPTARAP™

Istruzioni per l'uso

Una volta appurato di dover applicare una fasciatura, è opportuno attuare le seguenti operazioni per ottimizzare le prestazioni di ZINPRO ADAPTARAP.

Se occorre medicare una ferita, la cosa migliore da fare è utilizzare della garza per evitare che lo spray o la pomata della medicazione sciolgano prematuramente ADAPTARAP.

Cominciare applicando ADAPTARAP come una normale fasciatura. Applicarlo con una pressione costante durante la fasciatura della zampa, riducendo il divario tra gli strati al fine di migliorare l'aderenza. La sua natura non elastica garantisce una buona tenuta senza aumentare il rischio di ferite da pressione.

ADAPTARAP deve essere applicato sui talloni per poi salire sul retro della zampa fino a poco sotto lo sperone, questo impedisce alla fasciatura di scivolare via prematuramente. Accertarsi di far passare tra le dita la fasciatura ad ogni giro, per evitare che questa venga persa prematuramente.

ADAPTARAP è stato progettato per rimanere sullo zoccolo per un periodo di tempo compreso tra due ore e cinque giorni, se applicato correttamente. Per garantire la massima tenuta, occorrono almeno due giri che coprano entrambi i talloni. È possibile estendere la durata della fasciatura aumentando il numero di giri e la lunghezza di ADAPTARAP applicato.

Una volta terminata la fasciatura, per bloccarla, bagnare l'estremità interna di ADAPTARAP con una piccola quantità di acqua e premerla saldamente contro il resto della fasciatura, fissandola. Per inumidire la fasciatura utilizzare un comune contenitore con spruzzino. Nei periodi in cui la temperatura è particolarmente bassa, si ottengono i risultati migliori usando acqua calda.