



ADAPTARAP™

Mode d'emploi

Lorsque la décision de mettre un bandage a été prise, les étapes suivantes permettent d'obtenir les meilleurs résultats avec ZINPRO ADAPTARAP.

Si un traitement doit être appliqué, le mieux est d'utiliser une compresse pour le maintenir en place. Ceci est essentiel dans le cas d'un spray, d'une pommade ou de tout autre liquide qui pourrait dissoudre prématurément ADAPTARAP.

Posez ADAPTARAP de la même manière que les bandages traditionnels. Appliquez le avec une pression constante en enveloppant le pied, réduisant l'espace entre les couches pour favoriser une meilleure adhérence. Sa nature non élastique permet un ajustement serré sans augmenter le risque de plaies de pression.

Passez la bande entre les onglons et évitez de faire un tour complet du pied sans passer entre les onglons. Cela accélère le processus d'auto-élimination. ADAPTARAP doit être appliqué sur le talon jusqu'au-dessous des ergots afin que la bande ne glisse pas pendant la période de traitement.

ADAPTARAP a été conçu pour rester sur le pied entre deux heures et cinq jours lorsqu'il est correctement appliqué. Il faut au moins deux tours couvrant chacun des talons pour obtenir une durée minimale. La persistance peut être prolongée en augmentant le nombre de tours autour du pied.

Une fois le pansement terminé, il suffit de mouiller le bout de la bande avec de l'eau pour la coller sur le bandage par une légère pression. Un flacon pulvérisateur peut être utilisé. En cas de températures très froides, utilisez de l'eau chaude pour obtenir de meilleurs résultats.