



ADAPTARAP™

Instrucciones de Uso

Una vez determinado que se debe aplicar una venda, los siguientes pasos ayudarán a conseguir el mejor rendimiento con ZINPRO ADAPTARAP.

Si se va a aplicar un tratamiento de heridas, es una buena práctica utilizar una gasa para aplicar y mantener el tratamiento en su sitio. Esto es fundamental si el tratamiento es un aerosol, una pomada u otro líquido que pueda disolver prematuramente ADAPTARAP.

Comience aplicando ADAPTARAP de manera similar a los vendajes tradicionales. Aplique una presión constante mientras se venda el pie, reduciendo los espacios entre las capas para favorecer una mejor adherencia. Su naturaleza no elástica garantiza un ajuste perfecto sin aumentar el riesgo de heridas por presión.

Evite completar múltiples vueltas de 360 grados alrededor de la pezuña sin pasar cada vez entre los dedos. Esto acelerará el proceso de autoeliminación. ADAPTARAP debe aplicarse sobre los talones y subiendo por la parte posterior de la pata hasta justo debajo de los dedos accesorios, para evitar que la envoltura se deslice hacia abajo durante el periodo de tratamiento.

ADAPTARAP fue diseñado para permanecer en la pezuña entre dos horas y cinco días de aplicación, cuando la aplicación es correcta. Se necesitará un mínimo de dos vueltas cubriendo cada talón para conseguir una persistencia mínima. La persistencia de la venda puede prolongarse aumentando el número de vueltas y la longitud de ADAPTARAP que se aplica.

Después de aplicar la cantidad deseada de ADAPTARAP, humedezca el extremo de la envoltura con una pequeña cantidad de agua y presiónela firmemente contra el resto de la envoltura, creando un sello. Un pulverizador funciona bien para mojar ADAPTARAP. En épocas de frío extremo, utilice agua caliente para obtener los mejores resultados.