

FLUX



La sonda ruminal larga.

**científicamente
probado**

¿Qué es FLUX?

La sonda ruminal larga.

¿Para qué sirve el FLUX?

Administración segura de líquidos en el rumen.

¿Por qué es seguro el FLUX?

Si la marca en la sonda se encuentra con los incisivos, entonces el extremo de la sonda se encuentra en el rumen. No hay regurgitación.

¿Cómo utilizar?


Tire de la cabeza de la vaca hacia adelante. Cabeza, cuello y columna vertebral formarán una línea recta. Inserte el extremo de la sonda en la cavidad bucal en el borde sin dientes de la mandíbula. Con cuidado, empuje la sonda por el esófago hacia el rumen hasta que la marca en la sonda se encuentre con los incisivos. Conecte el embudo. Administrar fluidos. Retire **FLUX** con cuidado.

¿Cómo limpiar?

Conecte FLUX a un grifo de agua y enjuáguelo. Levante el extremo de la línea para que el agua corra hacia abajo a lo largo de la sonda exterior.

¿De qué está hecho el FLUX?

Acero inoxidable. Con marca.
Con embudo y conexión rápida GARDENA®.

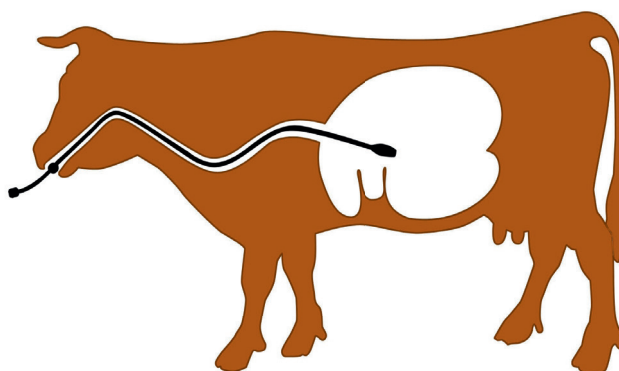

FLUX. Científicamente probado.

Geishauser et al. 2010: Tierärztl. Umsch. 65, 429-434.

FLUX. Administración segura de líquidos en el rumen.