

FLUX



Tubo lungo per il rumine.

testato
scientificamente

Cos'è FLUX?

Un tubo lungo per il rumine.

A cosa serve FLUX?

Per introdurre in modo sicuro liquidi nel rumine.

Cosa rende FLUX sicuro?

Se la marcatura è all'altezza degli incisivi, allora la fine del tubo è nel rumine. Nessuna deglutizione.

Come usarlo?


Tirare in avanti la testa della vacca in modo che testa, collo e spina dorsale formino una linea. Inserire **FLUX** nella cavità orale nella zona del margine senza denti della mandibola. Far avanzare con cautela **FLUX** fino a quando la marcatura si trova all'altezza degli incisivi. Collegare l'imbuto. Aggiungere il liquido. Estrarre **FLUX** con cautela.

Come pulirlo?

Allacciare **FLUX** a un rubinetto e sciacquare abbondantemente. Tenere la parte superiore di **FLUX** in alto affinché tutta l'acqua fuoriesca completamente dal tubo.

Di cosa è fatto FLUX?

Di acciaio inox, con marcatura, imbuto e chiusura rapida GARDENA®.

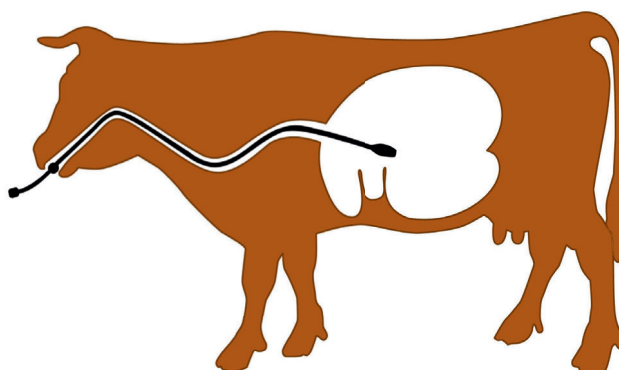

FLUX. Testato scientificamente.

Geishauser et al. 2010: Tierärztl. Umsch. 65, 429-434.

FLUX. Per introdurre in modo sicuro liquidi nel rumine.