

FLUX



De lange penssonde.

wetenschappelijk
getest

Wat is FLUX?

De lange penssonde.

Waarvoor wordt de FLUX gebruikt?

Om veilig vocht in te brengen in de pens.

Wat maakt de FLUX veilig?

Als de sonde tot de markering is ingebracht, ligt het uiteinde van de sonde in de pens. Geen regurgitatie.

Hoe gebruik je het?


Beweeg de kop van de koe naar voren, zodat kop, hals en ruggengraat een rechte lijn vormen. Schuif de **FLUX** bij de mondhoek in de bek. Schuif de **FLUX** voorzichtig verder, totdat de markering bij de snijtanden zit. Sluit de trechter aan. Giet het vocht in de trechter. Trek de **FLUX** voorzichtig terug.

Reinigen

Sluit de **FLUX** op een kraan aan en spoel hem door. Houd het uiteinde van de sonde omhoog, zodat het water langs de buitenkant van de sonde stroomt.

Van welk materiaal is de FLUX gemaakt?

Roestvrij staal, met markering, trechter en GARDENA®-snelaansluitstuk.

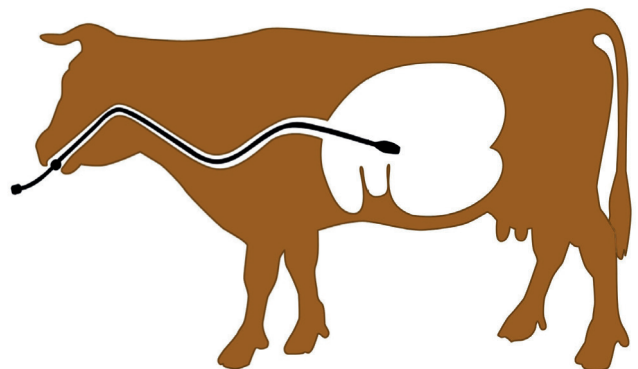

FLUX. Wetenschappelijk getest.

Geishauser et al. 2010: Tierärztl. Umsch. 65, 429–434.

FLUX. Veilig vocht inbrengen in de pens.