

FLUX



Die lange Pansenleitung.

wissenschaftlich
geprüft

Was ist FLUX?

Die lange Pansenleitung.

Wofür ist die FLUX?

Zur sicheren Eingabe von Flüssigkeit in den Pansen.

Warum ist die FLUX sicher?

Liegt die Markierung auf Höhe der Schneidezähne, dann liegt das Ende im Pansen. Kein Verschlucken.

Wie anwenden?


Kopf der Kuh nach vorne ziehen, so dass Kopf, Hals und Wirbelsäule eine Gerade bilden. **FLUX** im Bereich des zahnfreien Kiefferrandes in die Maulhöhle einschleiben. **FLUX** vorsichtig soweit schieben, bis die Markierung auf Höhe der Schneidezähne liegt. Trichter anschließen. Flüssigkeit eingeben. **FLUX** vorsichtig herausziehen.

Wie reinigen?

FLUX an einen Wasserhahn anschließen und durchspülen. **FLUX**-Kopf hochhalten, damit das austretende Wasser außen entlang der Leitung abläuft.

Woraus besteht FLUX?

Aus Edelstahl, mit Markierung, mit Trichter und GARDENA®-Schnellverschluß.

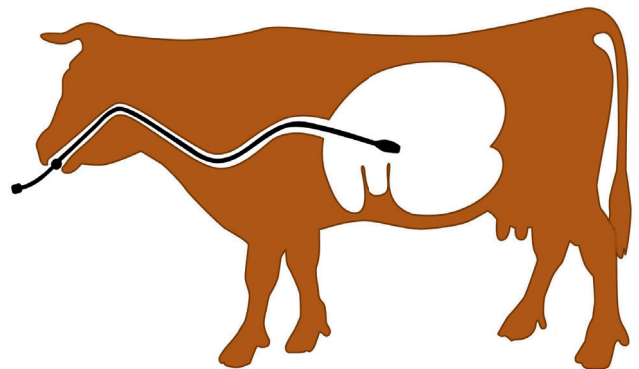

FLUX. Wissenschaftlich geprüft.

Geishauser et al. 2010: Tierärztl. Umsch. 65, 429–434.

FLUX. Sichere Eingabe von Flüssigkeit in den Pansen.