

JUNIOR[®]



El primer aplicador ergonómico de píldoras para terneros.

científicamente probado

¿Qué es JUNIOR?

Es el primer aplicador ergonómico de píldoras para terneros. Mas manejable y mas suave.

¿Para qué es JUNIOR?

Para introducir píldoras en los terneros y terneras alimentados con leche.

¿Qué es ergonómico?

JUNIOR tiene la misma curva que va

desde la cavidad oral hacia el esófago. Y la punta de **JUNIOR** es redondeada.

¿Que es mas manejable?

JUNIOR se adapta mas confortable a la mano. No cambio de la empuñadura.

¿Cómo usarlo?

Insertar la píldora dentro de la punta. Agarre el borde libre de dientes del

paladar, cosquillee el paladar hasta que el ternero abra la boca, inserte suavemente el aplicador **JUNIOR** dentro de la cavidad oral, deslícelo cuidadosamente a lo largo de la base de la lengua. Finalmente, libere la píldora.

¿Cómo limpiar?

Enjuagar con agua caliente.



Cosquille el paladar hasta que abra la boca.



Inserte suavemente el aplicador.



JUNIOR. Ergonómico.

JUNIOR. Científicamente probado.

JUNIOR[®]. Mas manejable y mas suave.