

JUNIOR[®]



De eerste ergonomische pillentoediener voor kalveren.

wetenschappelijk
getest

Wat is de JUNIOR?

De eerste ergonomische pillentoediener voor kalveren. Handiger en zachter.

Waarvoor is de JUNIOR?

Zogende kalveren.

Wat is er ergonomisch aan?

De JUNIOR is gebogen, net als de weg door de mondholte naar de

keelholte. De kelk van de JUNIOR is afgerond.

Wat is er handig aan?

De JUNIOR ligt beter in de hand. Ompakken is niet nodig.

Hoe gebruik ik de JUNIOR?

Leg de pil in de kelk. Grijp met één hand over de neusrug, pak de tandeloze

kaakrand vast en kietel het gehemelte totdat het kalf zijn bek vanzelf opent. Schuif de JUNIOR met de andere hand voorzichtig in de mondholte tot over de tongbasis. Knijp dan in de hendel om de pil vrij te geven.

Hoe reinigen?

Met heet stromend water afspoelen.



Gehemelte kietelen totdat zijn bek vanzelf opent.



Pillentoediener voorzichtig naar binnen schuiven.



JUNIOR. Ergonomisch.

JUNIOR. Wetenschappelijk getest.

JUNIOR[®]. Handiger en zachter.