

JUNIOR[®]



Den første ergonomiske pilleindgiver til kalve.

videnskabeligt testet

Hvad er JUNIOR?

Den første ergonomiske pilleindgiver til kalve. Mere praktisk og skånsomt.

Hvem er JUNIOR til?

Spædkalve.

Hvad menes med ergonomisk?

JUNIOR er bøjet, så den følger udformningen af kalvens mundhule

til svælget. Den afsluttende skål på JUNIOR er afrundet.

Hvad menes med mere praktisk?

JUNIOR ligger bedre i hånden. Kan betjenes med en hånd.

Hvordan anvendes den?

Indsæt pillen i skålen. En hånd føres hen over næseryggen og ind i det

tandfrie område i overkæben. Kild ganen indtil kalven selv åbner munden. Med den anden hånd indføres JUNIOR forsigtigt i mundhulen. Før den forsigtigt hen over tungeryggen. Indgiv pillen.

Rengøring?

Skylles under rindende, varmt vand.



Ganen kildes indtil munden åbnes.



Indgiver føres forsigtigt ind.



JUNIOR. Ergonomisk.

JUNIOR. Videnskabeligt testet..

JUNIOR[®]. Mere praktisk og skånsomt.