

# JUNIOR<sup>®</sup>



## Le premier applicateur de pilules ergonomique pour les veaux.

testé  
scientifiquement

### Qu'est-ce que JUNIOR?

Le premier applicateur de pilules ergonomique pour les veaux. Pratique et plus doux.

### À qui est destiné JUNIOR?

Aux veaux allaités.

### En quoi est-il ergonomique?

JUNIOR est recourbé, comme les voies allant de la gueule à l'œsophage.

Le calice de JUNIOR est rond.

### En quoi est-il plus pratique?

JUNIOR tient mieux dans la main. On ne doit pas changer de prise.

### Comment l'utiliser?

Placer la pilule dans le calice. Saisir la partie de la mâchoire dépourvue de dents avec une main par-dessus le nez. Chatouiller le palais jusqu'à

ce que le veau ouvre la gueule.


Avec l'autre main, introduire JUNIOR avec précaution. L'avancer par-dessus la base de la langue. Libérer la pilule.

### Comment le nettoyer?

Rincer à l'eau chaude.



Chatouiller le palais jusqu'à ce que le veau ouvre la gueule.

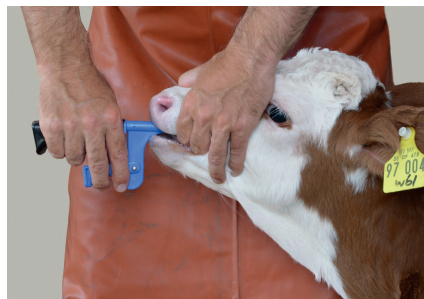

Introduire prudemment l'applicateur.



JUNIOR. Ergonomique.

JUNIOR. Testé scientifiquement.

## JUNIOR<sup>®</sup>. Plus pratique et plus doux.