

JUNIOR[®]



Der erste ergonomische Pilleneingeger für Kälber.

wissenschaftlich
geprüft

Was ist **JUNIOR**?

Der erste ergonomische Pilleneingeger für Kälber. Handlicher und sanfter.

Wofür ist der **JUNIOR**?

Saugkälber.

Was ist ergonomisch?

Der **JUNIOR** ist gebogen, wie der Weg durch die Maulhöhle zum Schlund. Der Kelch des **JUNIOR** ist rund.

Was ist handlicher?

Der **JUNIOR** liegt besser in der Hand. Kein Umgreifen erforderlich.

Wie anwenden?

Pille in den Kelch einsetzen. Mit einer Hand über den Nasenrücken in den zahnfreien Kiefferrand fassen. Gaumen kitzeln, bis das Kalb das Maul von selber öffnet. Mit der anderen Hand **JUNIOR** vorsichtig in die Maulhöhle

schieben. Vorsichtig über den Zungengrund hinweg schieben. Pille freigeben.

Wie reinigen?


Mit fließendem heißen Wasser abspülen.



Gaumen kitzeln bis das Maul öffnet.



Eingeger vorsichtig einschieben.

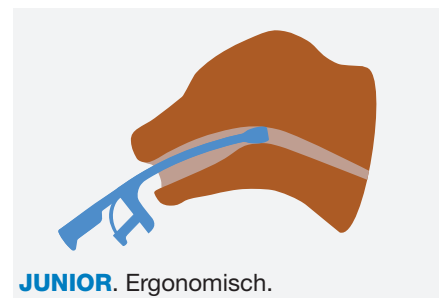

JUNIOR. Ergonomisch.

JUNIOR. Wissenschaftlich geprüft.

JUNIOR[®]. Handlicher und sanfter.