

# SENIOR<sup>®</sup>



## De eerste ergonomische pillentoediener voor koeien.

wetenschappelijk  
getest

### Wat is de SENIOR?

De eerste ergonomische pillentoediener voor koeien. Handiger en zachter.

### Waarvoor is de SENIOR?

Melkkoelen.

### Wat is er ergonomisch aan?

De SENIOR is gebogen, net als de weg door de mondholte naar de keelholte. Het uiteinde is afgerond.

### Wat is er handig aan?

De SENIOR ligt beter in de hand.

### Waaruit bestaat de SENIOR?

De pijp is van roestvrij staal. De plunjier is van kunststof.

### Hoe gebruik ik de SENIOR?

Leg de pil in. Grijp met één hand over de neusrug, pak de tandeloze kaakrand

vast en kietel het gehemelte totdat de koe zijn bek vanzelf opent. Schuif de SENIOR met de andere hand voorzichtig in de mondholte. Voorzichtig over de tongbasis schuiven totdat de rode schroefkop zich ter hoogte van de neusspiegel bevindt. De pil vrijgeven.

### Hoe reinigen?

Met heet stromend water afspoelen.



Gehemelte kietelen totdat zijn bek vanzelf opent.



Pillentoediener voorzichtig naar binnen schuiven.



SENIOR. Ergonomisch.

SENIOR. Wetenschappelijk getest.

SENIOR<sup>®</sup>. Handiger en zachter.