

# SENIOR<sup>®</sup>



## Den første ergonomiske pilleindgiver til køer.

videnskabeligt  
testet

### Hvad er SENIOR?

Den første ergonomiske pilleindgiver til køer. Mere praktisk og skånsomt.

### Hvem er SENIOR til?

Malkekøer.

### Hvad menes med ergonomisk?

SENIOR er bøjet, så den følger mundhulens udformning på vej til svælget. Enden af SENIOR er afrundet.

### Hvad menes med mere praktisk?

SENIOR ligger bedre i hånden.

### Hvad er SENIOR lavet af?

Røret er lavet af rustfrit stål og stemplet af kunststof.

### Hvordan anvendes den?

Indsæt pillen. En hånd føres hen over næseryggen og ind i det tandfrie område i overkæben.

Kild ganen indtil koen selv åbner munden. Med den anden hånd indføres SENIOR forsigtigt i mundhulen. Før den forsigtigt hen over tungeryggen indtil det røde skruehoved ligger på højde med mulen. Indgiv pillen.

### Rengøring?

Skylles under rindende, varmt vand.



Ganen kildes indtil munden åbnes.



Indgiver føres forsigtigt ind.



SENIOR. Ergonomisk.

SENIOR. Videnskabeligt testet.

**SENIOR<sup>®</sup>.** Mere praktisk og skånsomt.