

SENIOR[®]



Le premier applicateur de pilules ergonomique pour les vaches.

testé
scientifiquement

Qu'est-ce que SENIOR?

Le premier applicateur de pilules ergonomique pour les vaches. Pratique et plus doux.

À qui est destiné SENIOR?

Aux vaches laitières.

En quoi est-il ergonomique?

SENIOR est recourbé, comme les voies allant de la gueule à l'œsophage. Sa terminaison est arrondie.

En quoi est-il plus pratique?

SENIOR tient mieux dans la main.

En quelle matière SENIOR est-il fait?

Le tube est en acier inoxydable, la tige d'éjection en matière synthétique.

Comment l'utiliser?

Placer la pilule. Saisir la partie de la mâchoire dépourvue de dents avec une main par-dessus le nez. Chatouiller le palais jusqu'à ce que la vache ouvre la gueule. Avec l'autre main, introduire **SENIOR** avec précaution. L'avancer par-dessus la base de la langue jusqu'à ce que la vis rouge se situe au niveau du mufle. Libérer la pilule.

Comment le nettoyer?


Rincer à l'eau chaude.



Chatouiller le palais jusqu'à ce que le veau ouvre la gueule.



Introduire prudemment l'applicateur.

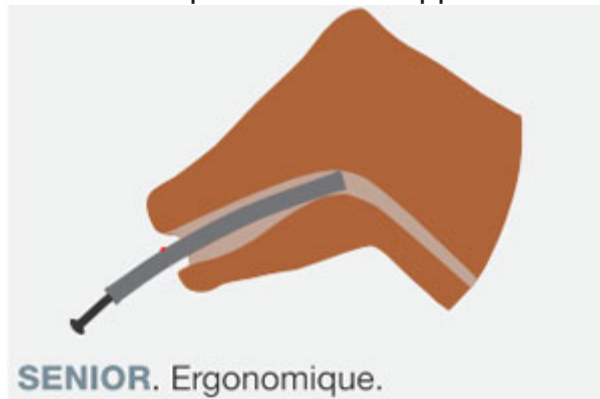

SENIOR. Testé scientifiquement.