

1901024

MS Lubricant

Use:

Lubricant for hands, arms, gloves and instruments for vaginal and rectal examination, or obstetric treatments.

MS Glijmiddel

Toepassing:

Glijmiddel kan worden toegepast voor het gladmaken van handen, armen, handschoenen en instrumenten bij vaginale en rectale exploraties of bij verloskundige ingrepen.

MS Gleitmittel

Verwendungszweck:

MS Gleitmittel kann verwendet werden, um das Einführen von Händen, Armen, Handschuhen und Instrumenten bei vaginalen und rektalen Eingriffen sowie bei der Geburtshilfe zu erleichtern.

MS Lubrifiant pour fouille

Application:

MS Lubrifiant est utilisé pour lubrifier les mains, les bras, les gants et les outils pour fouiller les animaux par voie rectale ou vaginale ou pour être utilisé pendant des interventions obstétriques.

MS Lubricante

Uso:

Lubricante para manos, brazos, guantes e instrumentos para examen vaginal y rectal, o para tratamiento obstétrico.

MS Lubrificante

Uso:

Lubrificante per mani, braccia, guanti e strumenti per ispezioni vaginali e rettali o per interventi ostetrici.

Directions for use:

Clean hands and arms thoroughly prior to liberal application of the lubricant.

Toedieningswijze:

Handen, armen en instrumenten goed reinigen en naar eigen bevinding ruim insmeren.

Anwendung:

Hände, Arme und Instrumente gut reinigen und nach eigenem Ermessen einschmieren.

Mode d'emploi:

Bien laver les mains, les bras et les instruments et ensuite les bien enduire avec le lubrifiant suivant sa propre approbation.

Modo de empleo:

Primero limpiar manos, brazos e instrumentos. A continuación untar según necesidad.

Modalità d'impiego:

Lavare bene mani, braccia e strumenti prima dell'applicazione del lubrificante.

Storage:

No specific demands.

Bewaring:

Geen specifieke eisen.

Aufbewahrung:

Keine besonderen Anforderungen

Stockage:

Aucune mesure spécifique à pendre.

Conservación:

No se requieren condiciones especiales.

Conservazione:

Non ci sono richieste specifiche.

Europe:

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

Deutschland:

Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

België:

Schippers BVBA
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

France:

Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais -
CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tel: 02 99 61 40 40

España:

Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona
Tel: 935 689 128

Italia:

Schippers Italia Srl
Via Belvedere 84
24022 Alzano Lombardo (BG)
Tel: 035-4490369

Export:

Schippers Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

21 LV 06

The
Schippers
Group

BATCH:



Download app!
Scan this product



1901024