


Montageanleitung MS Pigsleeper Flexy

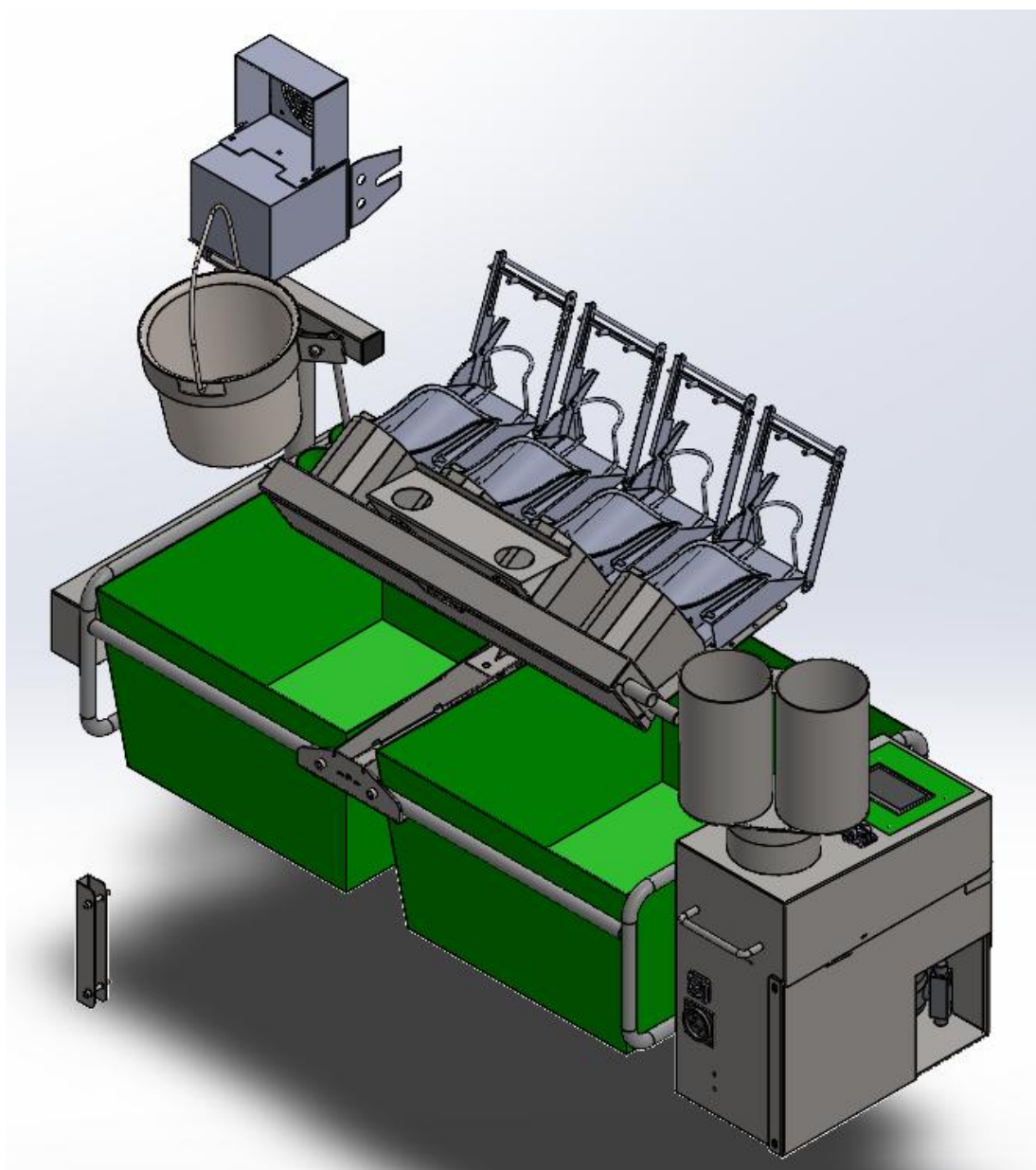


MS Schippers
Passion for farming

NL Klantenservice	+31 (0)497 339 787
BE Klantenservice/Service Clientèle	+32 (0)14-820713
DE Kundenservice	+49 (0)2833-923630
DK Kundeservice	+45 89884187
IT Servizio clienti	035-4490369
ES Servicio al cliente	+34 931816433
UK Customer Service	+44 (0)01733592049
CA Customer Service	+1 866 995-7771
FR Service Clientèle	+33 (0)2 99 61 40 40
EX Customer Service Export	+31 (0)497 700 278

Vorwort

Dieses Dokument beschreibt, wie der Pigsleeper Flexy korrekt zusammengebaut wird. Alles wird mit Bildern erklärt.

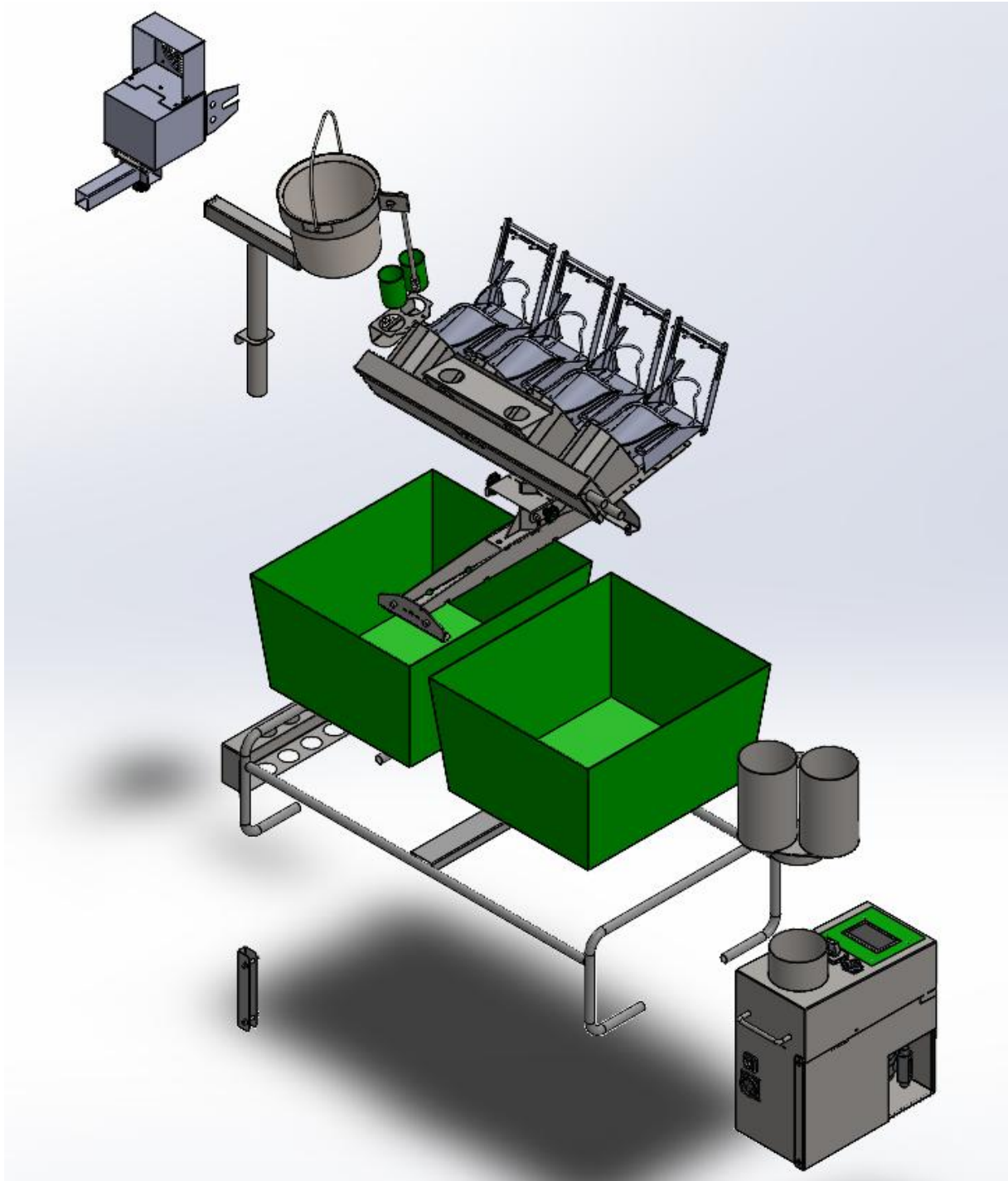

Inhoud

Vorwort	3
Montage der Traverse	5
Montage des Oberteils	11
Montage der Eimerhalterung (OPTIONAL).....	13
Montage Becherhalter oben	15


Erforderliches Werkzeug

Ring/Steckschlüssel 10 + 13

Inbusschlüssel für M5 , M6 und M8

Montage der Traverse

1. Nehmen Sie die Traverse („Querstütze“) und entfernen Sie die Folie.

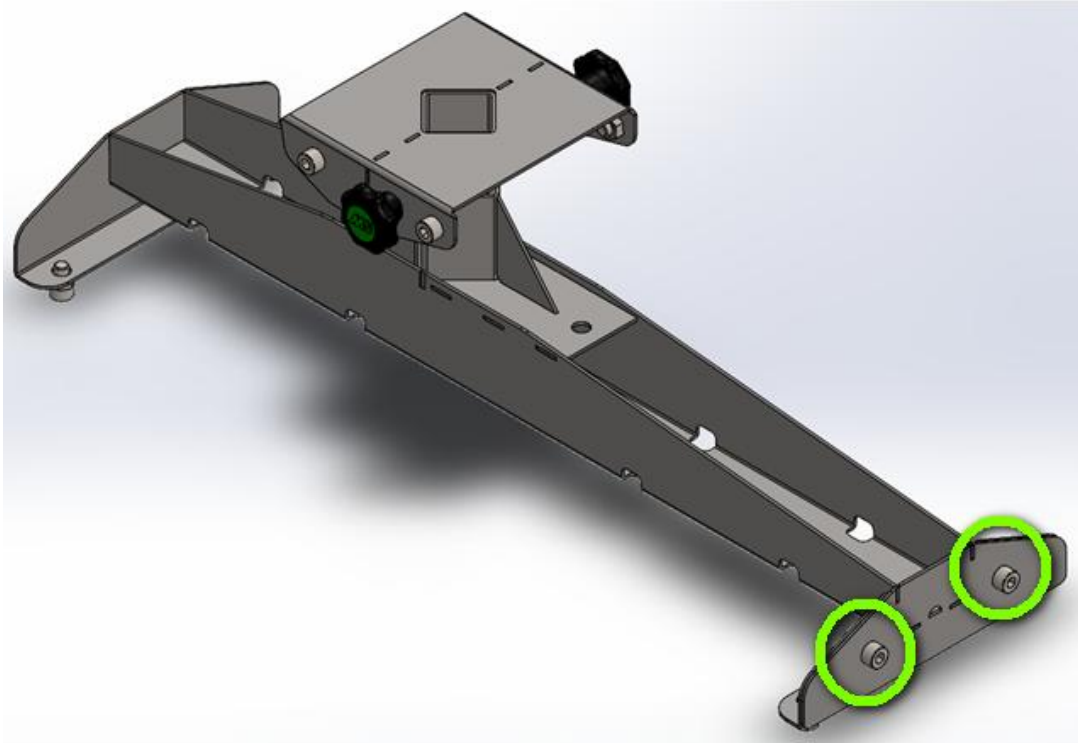


2. Diese wird mit allen nötigen Schrauben und Muttern geliefert.
Nehmen Sie nun die Seitenplatte ab, die mit Schrauben und Muttern verbunden ist (siehe Zeichnung und Foto).
Dazu benötigen Sie Schlüssel 13 und Inbusschlüssel M8.



3. Lösen Sie auf der anderen Seite der Traverse die beiden Inbusschrauben leicht, so dass sie bündig mit der Platte abschließen.




4. Entfernen Sie nun auch die oben auf der Traverse montierte Stütze. Dies kann von Hand erfolgen, da sie mit einem Sternknopf ausgestattet ist.

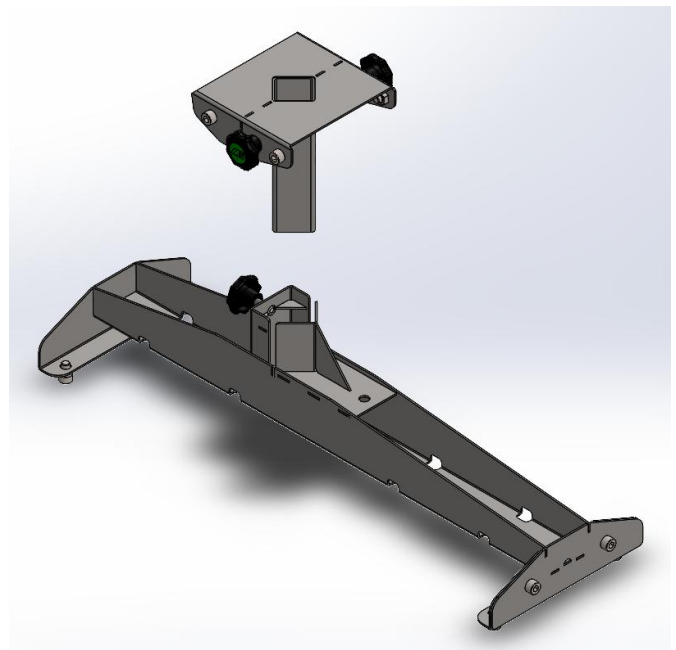

5. Setzen Sie die Traverse auf den mittleren Balken des Rahmens des Wagens.
6. Schieben Sie nun die Seitenplatte, die Sie in Schritt 2 entfernt haben, wieder auf den Rahmen. Schieben Sie ihn zwischen die Stange des Rahmens und die Seite der Traverse.

Tipp: Setzen Sie zuerst die Gegenmutter auf die Innenseite der Metallplatte. Schrauben Sie dann den M8-Bolzen von außen durch und befestigen Sie ihn.

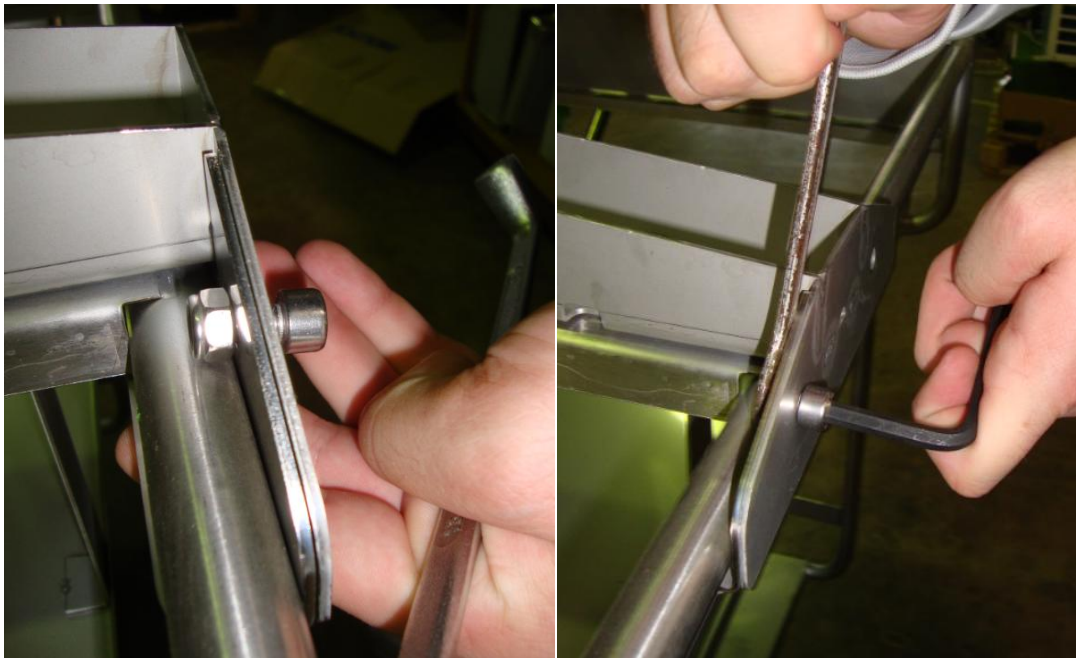


7. Nun, da die Traverse an ihrem Platz ist, kann sie auf beiden Seiten an den Unterseiten mit allen 4 Innensechskantschrauben festgezogen werden. Ziehen Sie sie fest, bis die Traverse fest am Rahmen eingespannt ist.

□



8. Nehmen Sie nun die 2 grünen Kisten und die 2 Werkzeugkästen. Legen Sie sie wie unten gezeigt in den Rahmen.


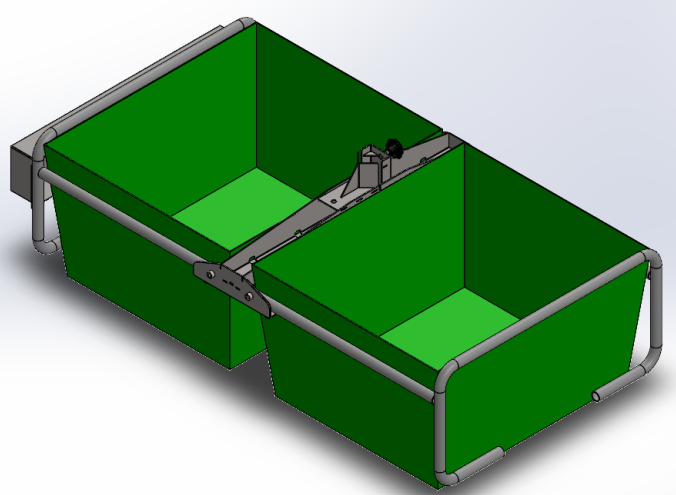


9. Führen Sie nun die Stütze wieder in die Halterung und ziehen Sie sie auf die gewünschte Arbeitshöhe fest. Der Sternknopf befindet sich an der Rückseite.



Montage der Kabeltrommel

10. Die Kabeltrommel wird mit der dafür vorgesehenen Halterung wie folgt montiert.
Nehmen Sie die Halterung und entfernen Sie die Bolzen und Muttern mit Schlüssel 10 und Inbus für M5.

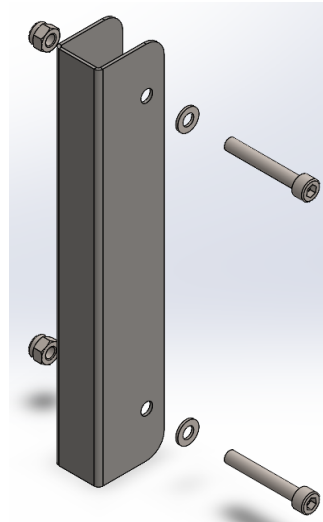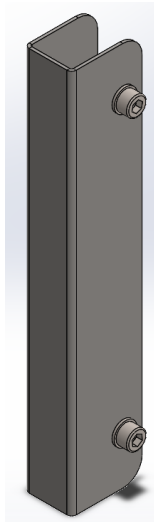


11. Diese Stütze kann auf 2 Arten montiert werden. Tun Sie dies entsprechend der Arbeitshöhe. Die 2 Arten sind unten dargestellt.
Achtung! Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.

Option 1: Hoch



Option 2: Niedrig

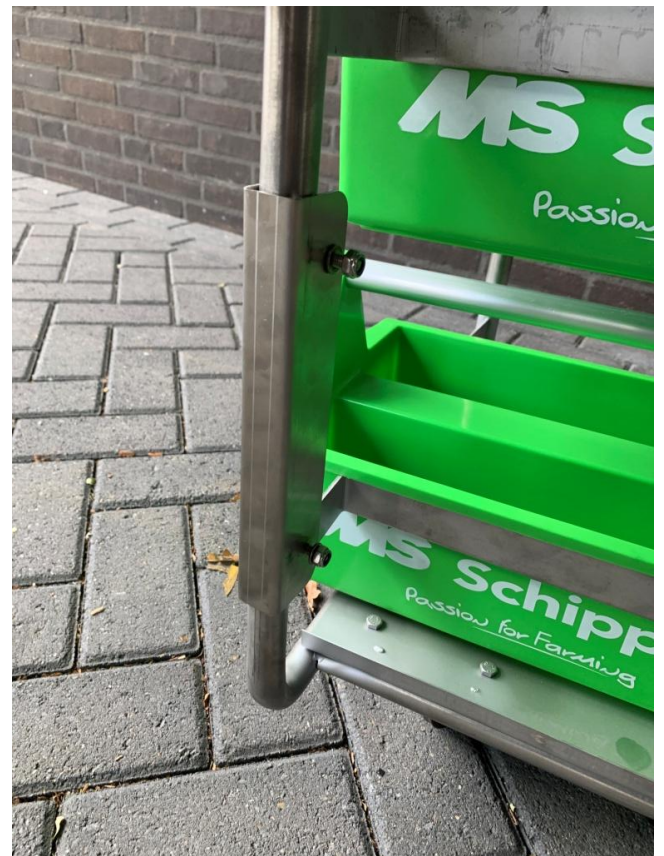

12. Achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe hervorstehen und nicht die Muttern. Hängen Sie dann den schwarzen Bügel der Kabeltrommel an den beiden Stützbolzen ein.



13. Ziehen Sie dann die Stützschauben und Muttern an, so dass die Kabeltrommel fest sitzt. Der zusammengebaute Rahmen sieht nun so aus:



Montage des Oberteils


14. Entfernen Sie nun die 4 Bolzen und die 2 schwarzen Knöpfe von der Traverse. Dazu benötigen Sie einen Inbusschlüssel für M8.



15. Platzieren Sie nun den oberen Teil wie folgt auf die Traverse.



16. Drehen Sie nun die Bolzen und sternförmigen Knöpfe wieder in die Traverse, so dass der obere Teil richtig befestigt ist. Dazu benötigen Sie einen Inbusschlüssel für M8.

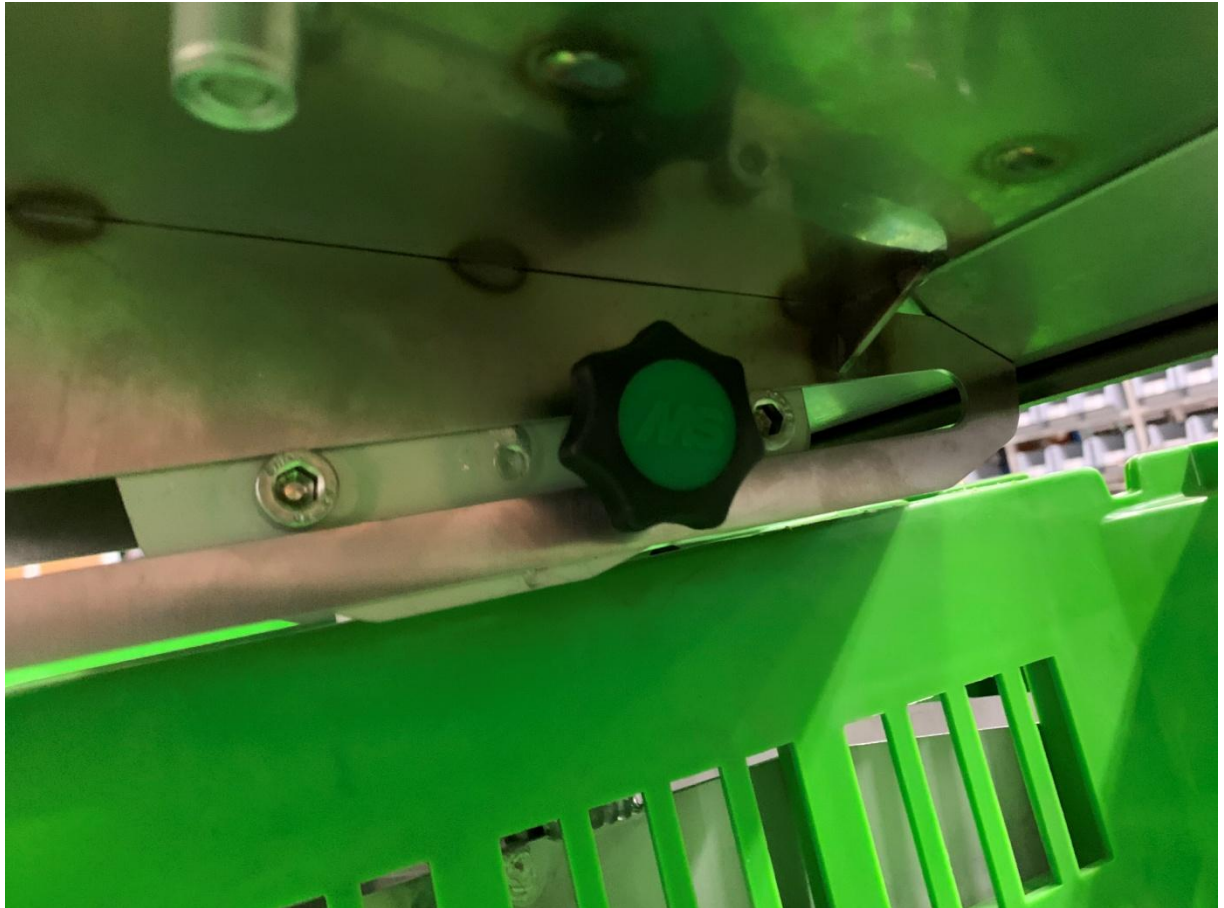

17. Der Pigsleeper sieht jetzt so aus:




Montage der Eimerhalterung (OPTIONAL)

18. Nehmen Sie die Eimerhalterung und entfernen Sie die Bolzen. Dazu benötigen Sie den Schraubenschlüssel 10 und einen Inbusschlüssel für M5.



19. Platzieren Sie sie an der Stelle mit den vorgebohrten Löchern.

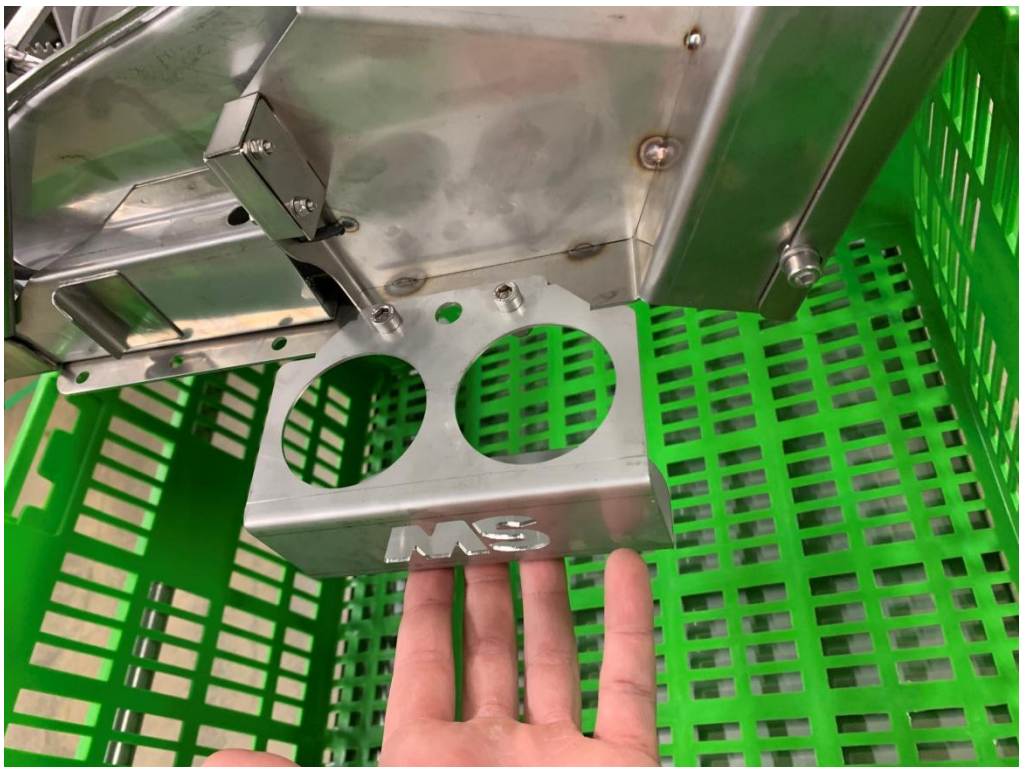

20. Nehmen Sie den Eimerhalter und schrauben Sie hier 1 Mutter ab.



21. Befestigen Sie die Stütze in der Bohrung der Halterung. Stellen Sie dann den Eimer in den Eimerhalter.


Montage Becherhalter oben

Grüne Becherchen: Artikelnr. 8802770

22. Nehmen Sie den Becherhalter, 2x Schrauben M6X16 und Unterlegscheiben M6.



23. Befestigen Sie die Stütze am oberen Teil mit den dafür vorgesehenen Löchern. Ziehen Sie es dann mit einem Inbusschlüssel für M6 fest.

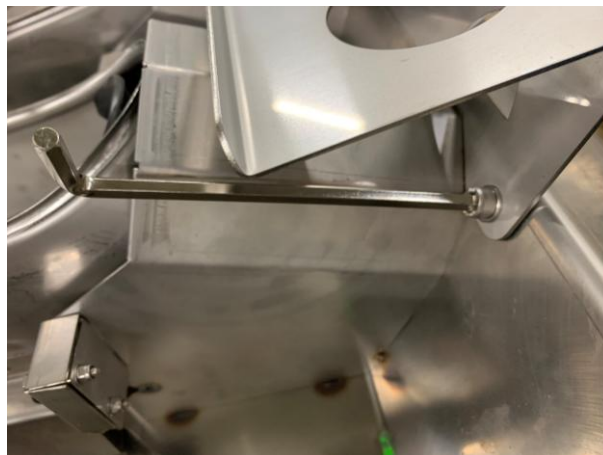


24. Der Pigsleeper sieht jetzt so aus:



Narkose-Einheit installieren.


1. Nehmen Sie den Narkose-unit und hängen Sie diese auf der freien, kurzen Seite des Wagens ein.

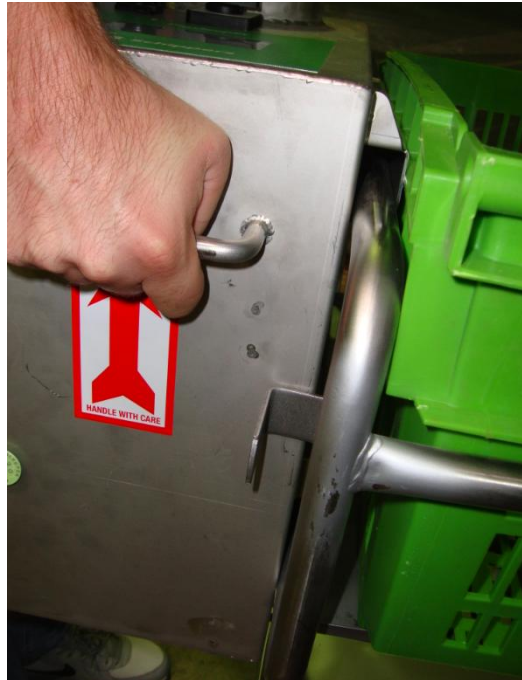

2. Nehmen Sie die beide Stecker der Ferkelschalen („Oberteil“) und stöpseln Sie die beiden Stecker in die Narkoseunit. (siehe Bild)



3. Stulpen Sie die einzelne Seite des blauen ‚Staubsauger‘-Schlauchs an das Ferkelschalen-Einheit. Die Seite des Blauen Schlauchs mit 2 Ausgänge stülpen Sie jetzt über die beide Isofluran-Filter (siehe nächste Schritt).

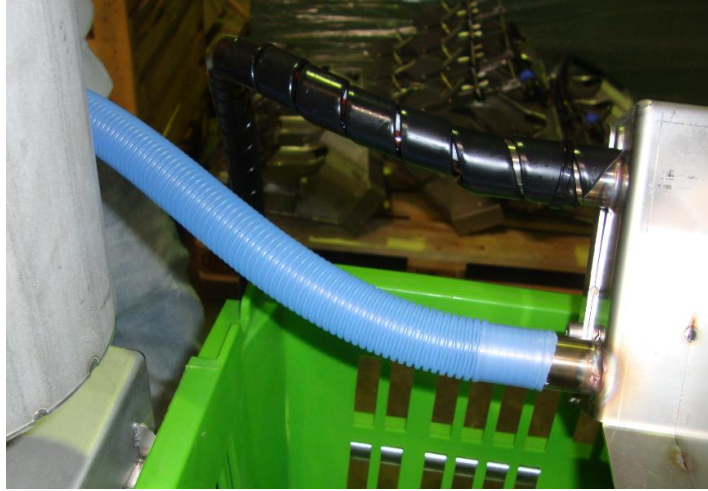

Isofluran-Filter Halterung

1. Nehmen Sie 2 Isofluran-Filter und setzen Sie diese in die dafür gedachte Halterung.
2. Stecke Sie die Halterung oben auf den Narkose-Unit. (siehe Bild)
3. Stülpen Sie jetzt den beide Ausgänge des blauen Schlauches auf die beide Filter.



Kompressor installieren

1. Nehmen Sie den dünnen blauen Schlauch und 2 Kupplungen (1x in Säckchen beim Kompressor im Karton und 1x in Säcken beim USB Stick und Lila Schlauch).
2. Befestigen Sie beide Kupplungen an den Schlauch. (siehe Bild)



3. Platzieren Sie den Kompressor auf die untere Ablage des Wagens.
4. Den Schlauch mit beiden Kupplungen können Sie jetzt in den Kompressor und den Wagen einrasten. (siehe Bild)



USB Stick

1. Der USB-Stick kann genutzt werden um ein Logbuch als Excel-Datei runter zu laden.



Lila Flaschenaufsatz

1. Dieser dient dazu den Verdampfer mit Isofluran zu befüllen. (siehe Bedienungsanleitung Pigsleeper).





NL Klantenservice	+31 (0)497 339 787
BE Klantenservice/Service Clientèle	+32 (0)14-820713
DE Kundenservice	+49 (0)2833-923630
DK Kundeservice	+45 89884187
IT Servizio clienti	035-4490369
ES Servicio al cliente	+34 931816433
UK Customer Service	+44 (0)01733592049
CA Customer Service	+1 866 995-7771
FR Service Clientèle	+33 (0)2 99 61 40 40
EX Customer Service Export	+31 (0)497 700 278