

# Opbouwinstructie MS PigSleeper Flexy




**MS Schippers**  
Passion for farming

NL Klantenservice  
BE Klantenservice/Service Clientèle  
DE Kundenservice  
DK Kundeservice  
IT Servizio clienti  
ES Servicio al cliente  
UK Customer Service  
CA Customer Service  
FR Service Clientèle  
EX Customer Service Export

+31 (0)497 339 787  
+32 (0)14-820713  
+49 (0)2833-923630  
+45 89884187  
035-4490369  
+34 931816433  
+44 (0)01733592049  
+1 866 995-7771  
+33 (0)2 99 61 40 40  
+31 (0)497 700 278

## Voorwoord

In dit document wordt beschreven hoe u de Pigsleeper op de juiste manier opbouwt. Alles wordt toegelicht met foto's.

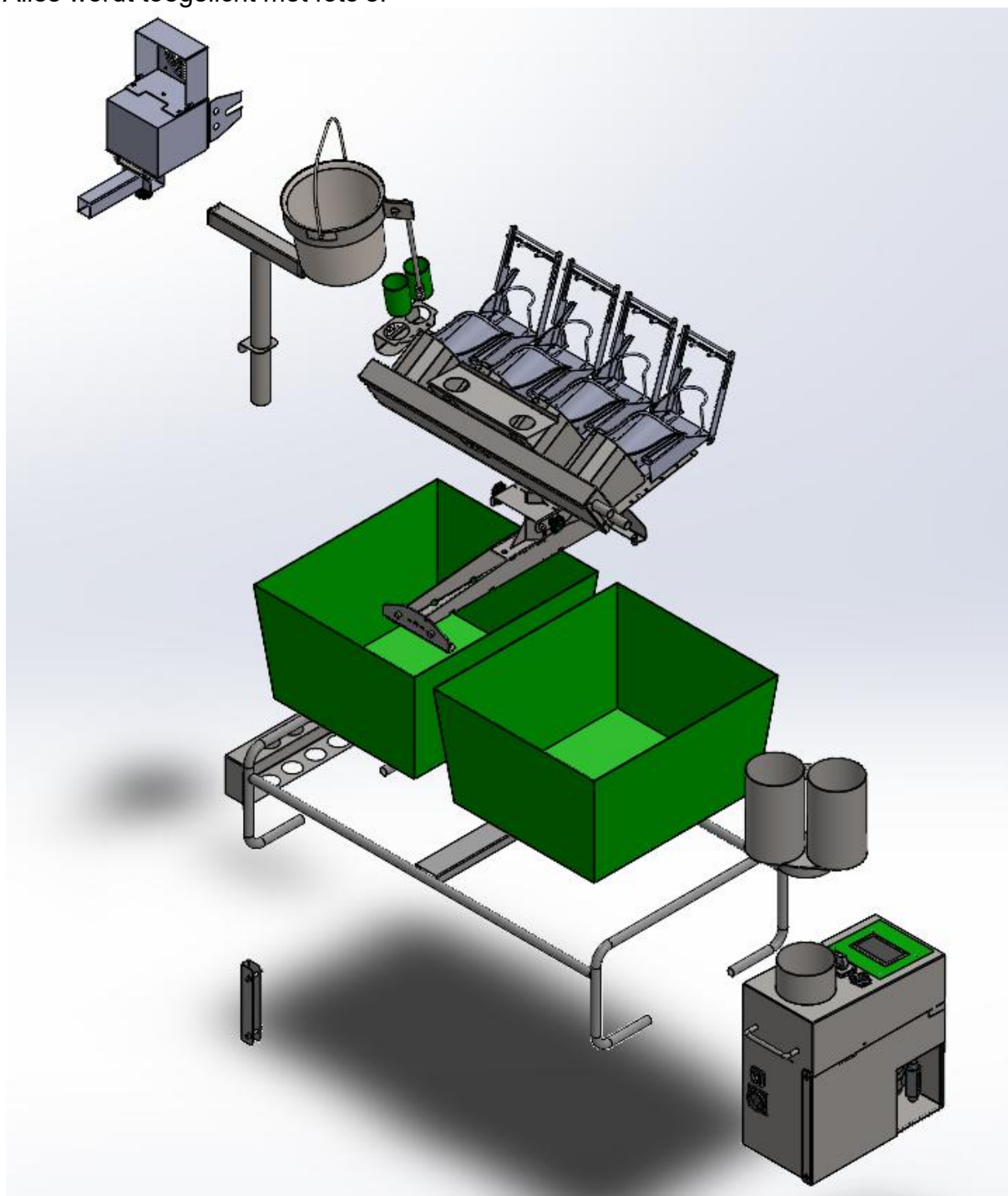

## Inhoud

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Voorwoord .....                                         | 2  |
| Installeren van de traverse.....                        | 4  |
| Installeren van kabelhaspel inclusief steun.....        | 9  |
| Installeren bovendeel.....                              | 11 |
| Installeren bekerhouder en emmerhouder (OPTIONEEL)..... | 13 |
| Installeren bekerhouder boven.....                      | 16 |
| Anesthesie unit installeren.....                        | 18 |
| Installeren filterhouder. ....                          | 19 |
| Installeren compressor.....                             | 20 |
| USB Stick.....                                          | 22 |
| Paarse flesbevestiging .....                            | 22 |


## Benodigd gereedschap

Ring/Steeksleutel 10 + 13


Inbus voor M5 , M6 en M8

## Installeren van de traverse


1. Pak de traverse steun en haal deze uit de folie. Deze ziet er zo uit:

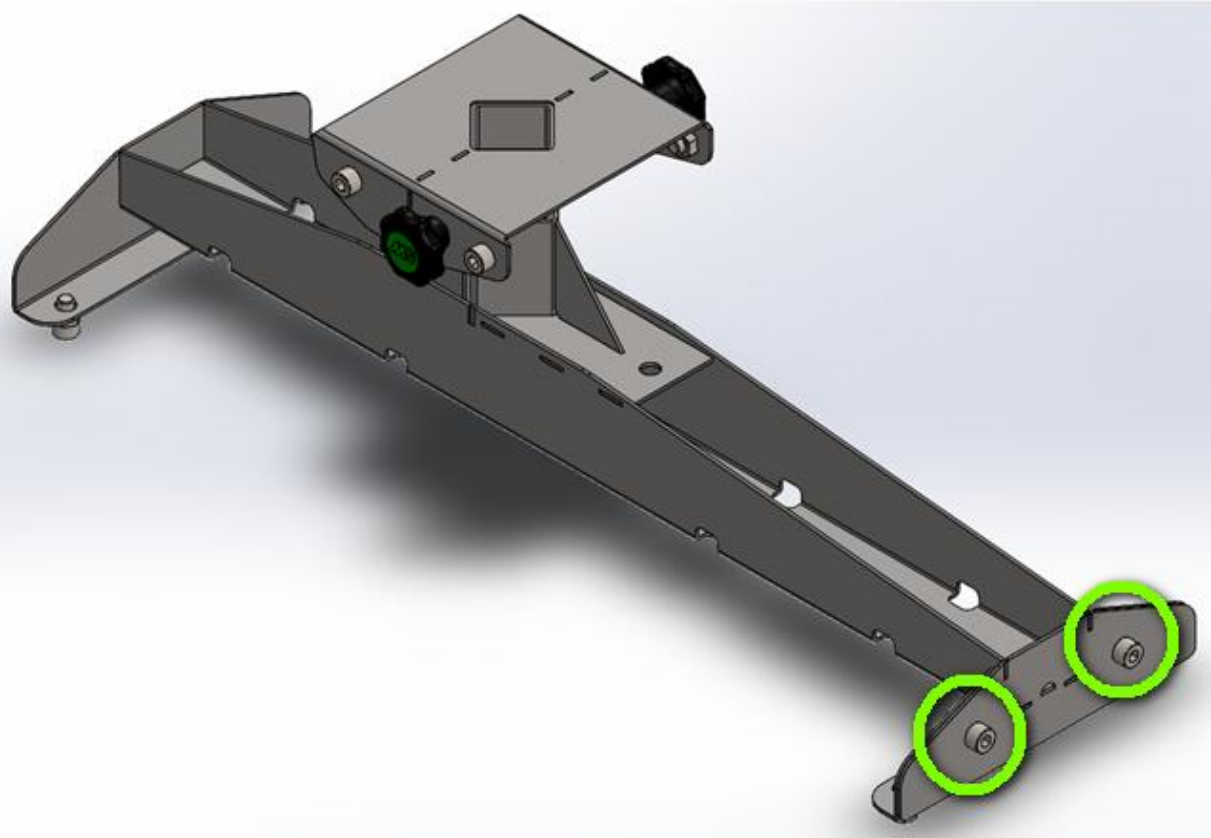



2. Deze is toegeleverd met alle bouten en moeren erin. Haal nu het zijplaatje, dat met moeren en bouten aan elkaar verbonden is, eraf. (zie tekening en foto). Hiervoor heeft u sleutel 13 en inbussleutel M8 nodig.

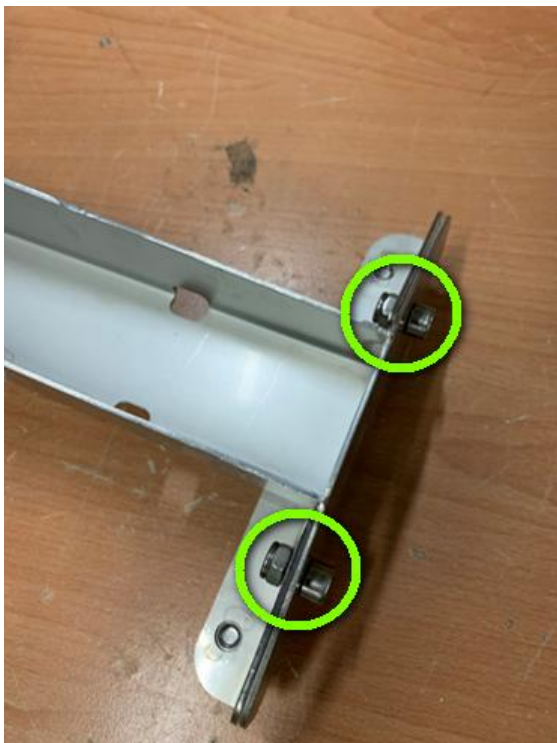

3. Draai aan de andere kant van de traverse de twee Inbusschroeven iets los, zodat ze vlak aanliggen met de plaat.

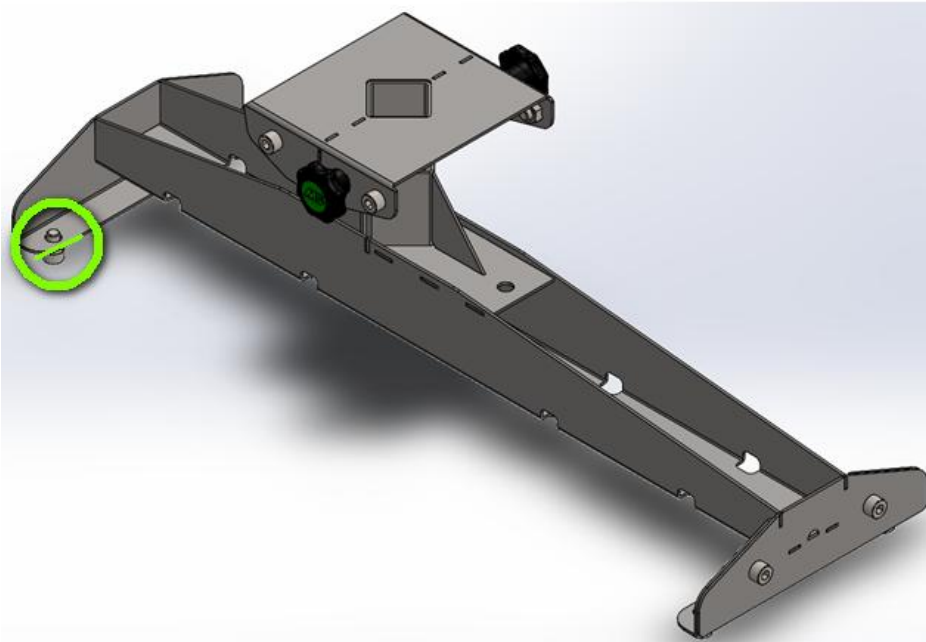


4. Haal nu ook de steun eraf die bovenop de traverse is gemonteerd. Dit kan met de hand worden gedaan, omdat deze met een sterknop is voorzien.

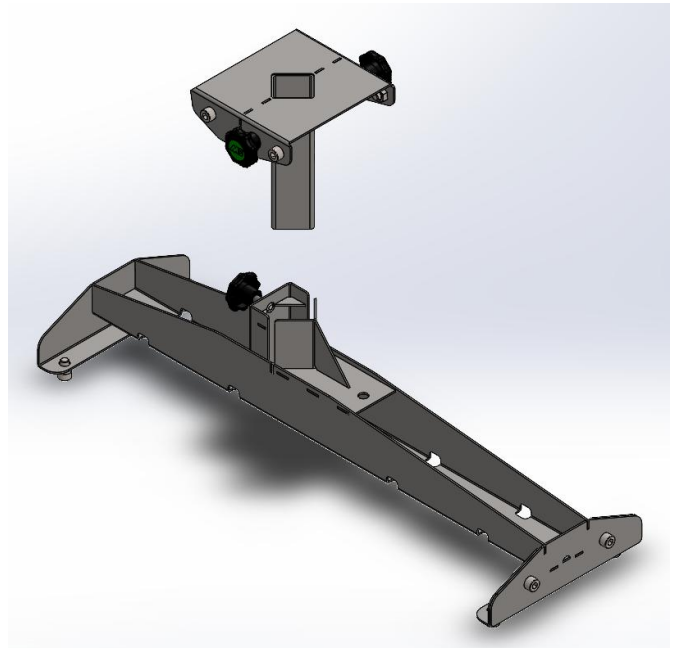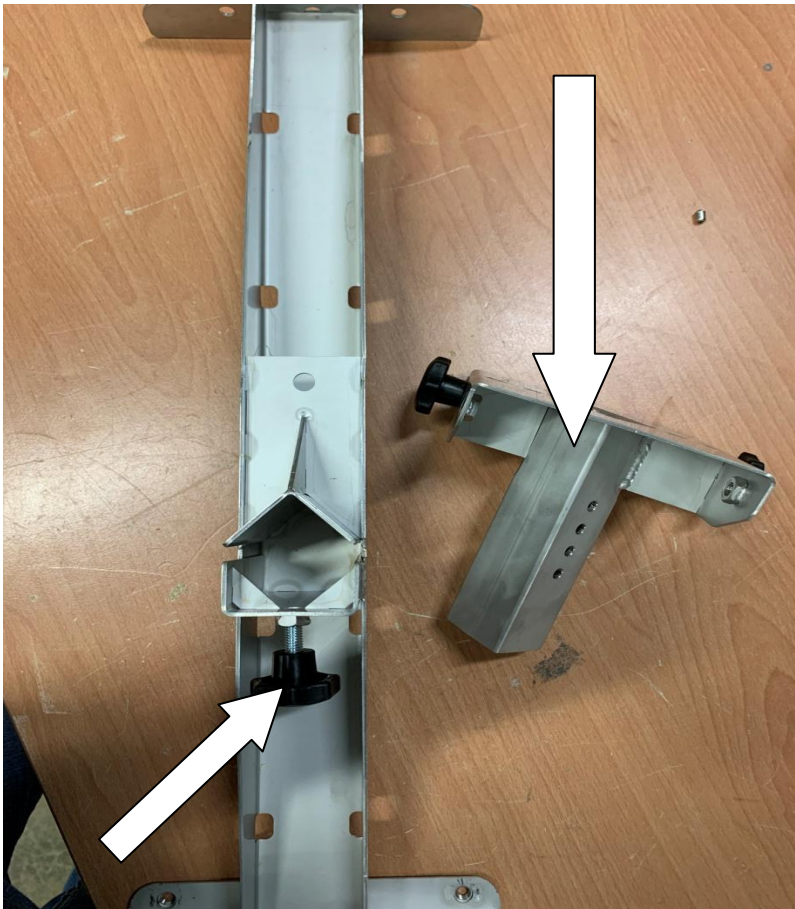

5. Zet de traverse op de middenbalk van het frame van de kar.
6. Schuif nu het zijplaatje, dat u er bij stap 2 hebt afgehaald, weer op. Dit schuift u tussen de stang van het frame en de zijkant van de traverse.


Tip: Zet eerst de borgmoer aan de binnenkant aan op het metalen plaatje. Vervolgens draait u van de buitenkant af de M8-bout er doorheen en zet het vast.

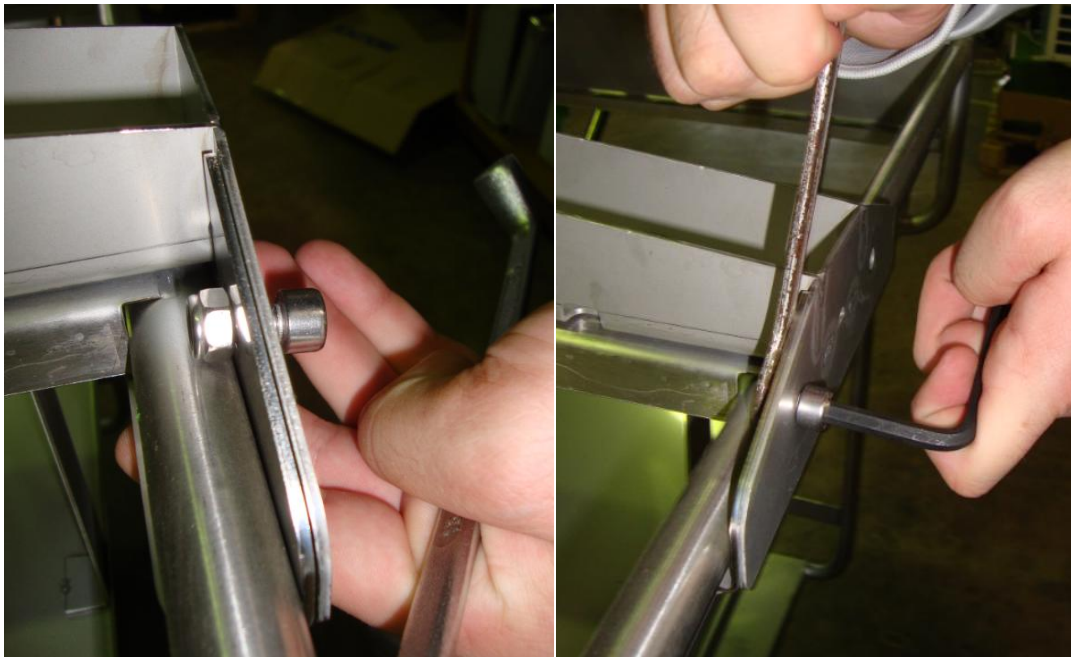

7. Nu de traverse op zijn plaats zit, kan deze aan weerszijden aan de onderkanten met alle 4 inbusbouten worden vastgedraaid.  
Draai deze vast, totdat de traverse stevig op het frame klemt. Zie afbeelding bij punt 8 voor de totaalopstelling.



8. Pak nu de 2 groene kratten en de 3 gereedschapstjes erbij. Zet deze op het Frame, zoals hieronder is afgebeeld.


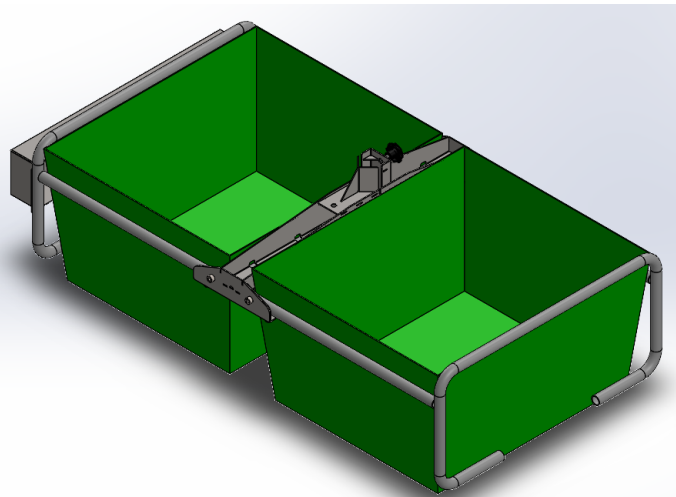


9. Zet nu de steun er weer bovenop en draai deze vast op de gewenste werkhogte. De sterknop zit aan de achterkant.



## Installeren van kabelhaspel inclusief steun

10. Als volgt wordt de kabelhaspel gemonteerd met de daarvoor gemaakte steun.  
Pak deze erbij en haal de bouten en moeren eruit met Sleutel 10 en Inbus M5.

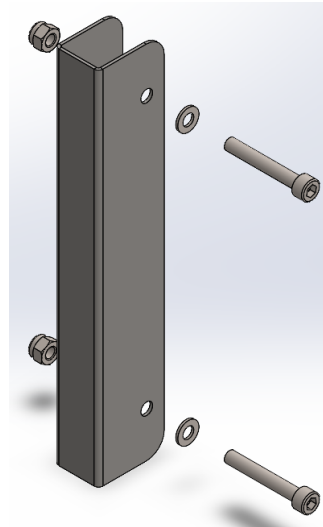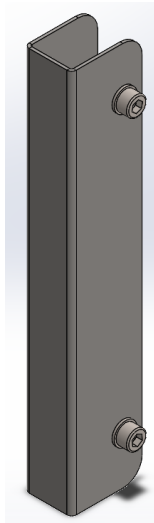


11. Deze steun kan op 2 manieren worden gemonteerd. Doe dit naar wens van de werkhoopte. Hieronder worden de 2 manieren afgebeeld.  
Let op! Draai de bouten nog niet aan. Op de volgende pagina vind u een afbeelding van de totaalopstelling.

**Optie 1: hoog**



**Optie 2: laag**

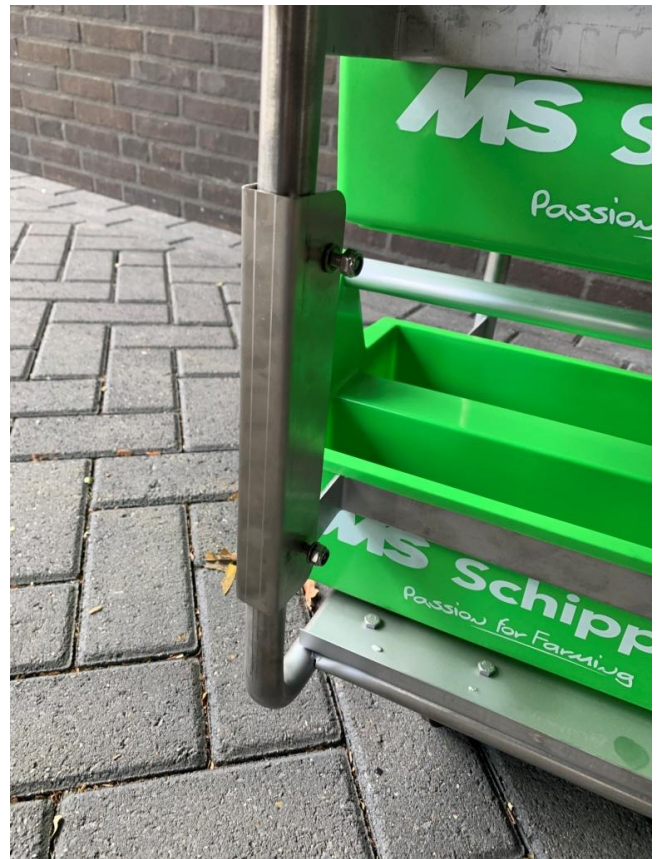

12. Zorg ervoor dat de boutkoppen uitsteken en niet de moeren. Haak hierna de zwarte beugel van de kabelhaspel op de beide steunbouten.



13. Draai hierna de steunbouten en moeren aan, zodat de kabelhaspel vast zit. Het opgebouwde frame ziet er nu als volgt uit:

NB: er zijn twee varianten stekkerdozen. In de afbeelding de zwarte variant, maar het kan ook zijn dat er een rode variant geleverd wordt.



## Installeren bovendeel


14. U haalt nu uit de traverse de 4 bouten en de 2 sterknoppen. Hiervoor heeft u een inbussleutel nodig voor M8.



15. Zet nu het bovendeel op de traverse op de volgende manier.



16. Draai nu de bouten en sterknoppen weer in de traverse zodat het bovendeel goed bevestigd is. Hiervoor heb je een inbussleutel nodig voor M8.

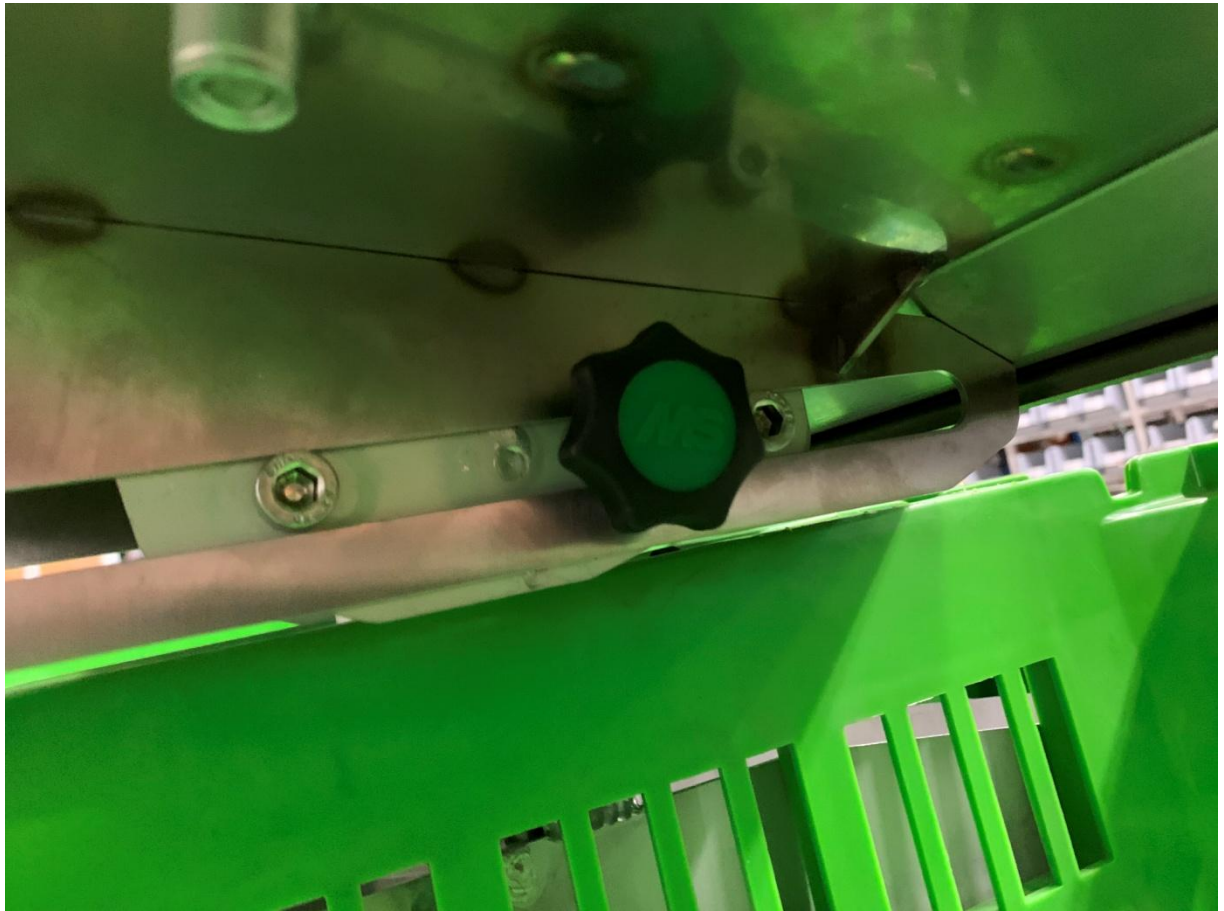

17. De pigsleeper ziet er nu als volgt uit:



## Installeren bekerhouder en emmerhouder (OPTIONEEL)

18. Als u de optionele bekerhouder voor de zijkant heeft, dan moet u deze eerst monteren. Haal de bouten eruit. Hiervoor heeft u sleutel 10 en een inbusleutel M5 nodig.




19. Monteer de steun naar wens links of rechts, in de daarvoor voorgeboorde gaten.



20. Pak de emmerhouder erbij en demonteer de moer .



21. Zet de steun vast in het gat van de emmersteun. Plaats daarna de emmer in de emmerhouder.

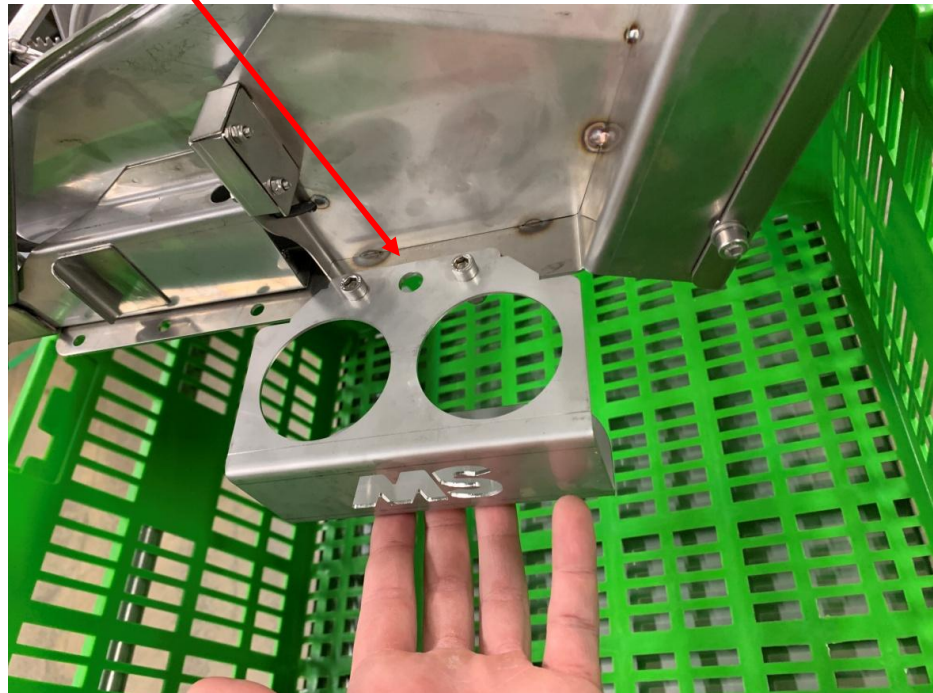


22. De pigsleeper ziet er nu als volgt uit:



## Installeren bekerhouder boven

Groene Bekertjes: artikelnr 8802770

23. Pak de bekerhouder. Demonteer 2 bouten M6 in het bovendee.

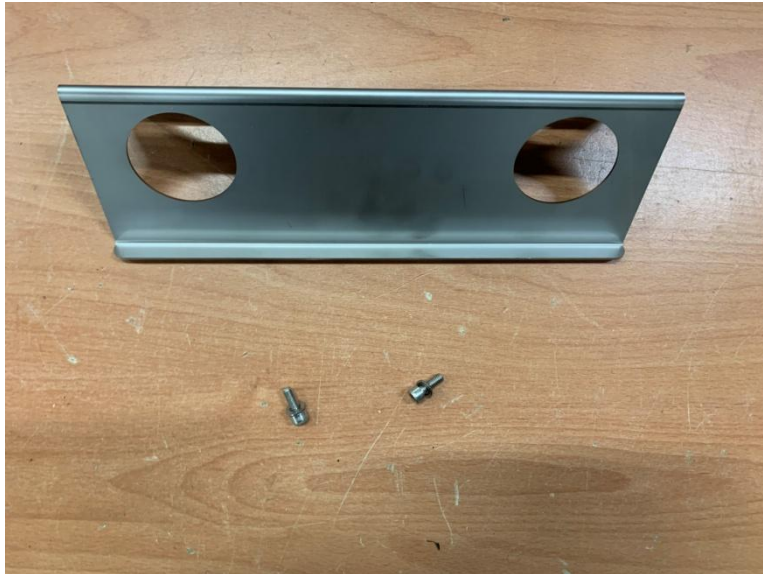

24. Bevestig de steun op het bovendee in de daarvoor bedoelde gaten. Draai deze vervolgens vast met een inbussleutel voor M6.




25. Zo staat de pigsleeper nu voor u.



## Anesthesie unit installeren.


1. Pak de anesthesie unit en hang deze aan de vrije zijde van de behandelwagen.

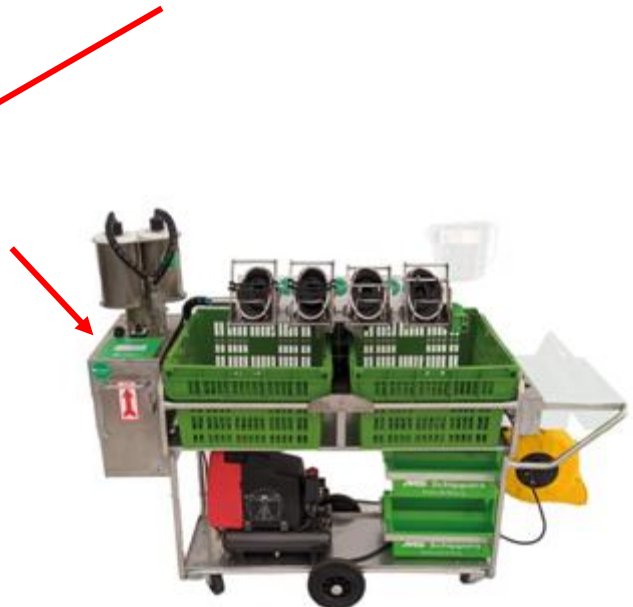

2. Pak de beide stekkeraansluitingen (Blauw: electro/sensoren, Zwart: Lucht) vanaf het bovendeel en sluit deze aan op de anesthesie unit, vergrendel deze door ze vast te draaien.



3. Plaats één blauwe “afzuigslang” op het bovendeeel, zoals op onderstaande afbeelding. Sluit de andere zijde aan op het meegeleverde Y-Stuk. Monteer de overige twee blauwe afzuigslangen ook op het Y-stuk.

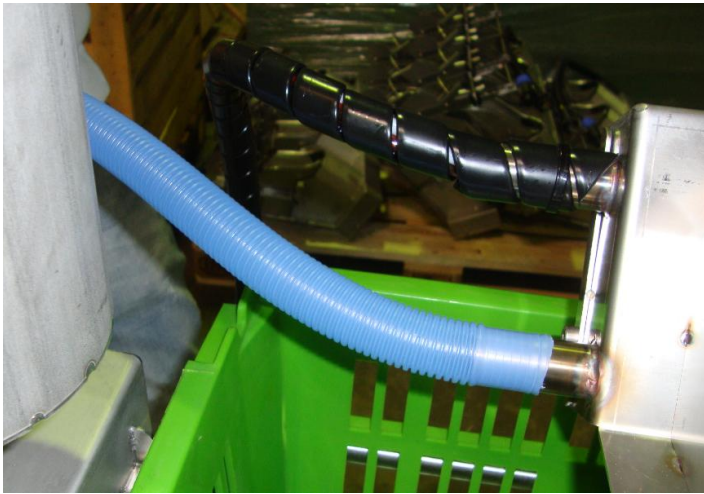

### Installeren filterhouder.

1. Neem 2 isofluraanfilters en plaats deze in de meegeleverde filterhouder.
2. Plaats de filterhouder inclusief de filters bovenop de anesthesie unit. ( Zie foto)
3. Bevestig nu de 2 uitlaten van de blauwe slang bovenop de 2 filters.



## Installeren compressor

1. Neem de dunne luchtslang en de 2 koppelingen. ( 1x in de zak bij de compressor en 1x in de zak bij de USB stick en paarse slang).
2. Bevestig beide koppelingen aan de slang ( zie foto).



Koppeling zijde  
compressor

Koppeling zijde  
anesthesie unit

3. Plaats de compressor op de onderkant van de behandelwagen, zie afbeelding
4. U kunt nu de slang met beide koppelingen in de compressor en in de anesthesie unit steken (zie foto).



5. Steek de stekker van de compressor in de stekkerdoos van de kabelhaspel.  
Steek de stekker van de kabelhaspel in het stopcontact (230V met randaarde)
6. Zet de compressor aan (rode knop uittrekken) en controleer of deze op 4 bar staat ingesteld. Een lagere druk tot minimum 1,7 bar is mogelijk. Dit resulteert in een lager verbruik van verdovingsgas, maar mogelijk ook een minder diepe narcose. Bij 1,7 bar is het verbruik het minimale zoals tijdens DLG certificering is vastgesteld.

## USB Stick

1. De USB stick kan worden gebruikt om een logboek als Excel bestand te downloaden. Nadere uitleg is te vinden in de algemene gebruikershandleiding van de PigSleeper.



## Paarse flesbevestiging

1. Deze wordt gebruikt om de verdamper met isofluraan te vullen. Voor nadere uitleg **zie gebruiksaanwijzing PigSleeper op de website**







|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| NL Klantenservice                   | +31 (0)497 339 787   |
| BE Klantenservice/Service Clientèle | +32 (0)14-820713     |
| DE Kundenservice                    | +49 (0)2833-923630   |
| DK Kundeservice                     | +45 89884187         |
| IT Servizio clienti                 | 035-4490369          |
| ES Servicio al cliente              | +34 931816433        |
| UK Customer Service                 | +44 (0)01733592049   |
| CA Customer Service                 | +1 866 995-7771      |
| FR Service Clientèle                | +33 (0)2 99 61 40 40 |
| EX Customer Service Export          | +31 (0)497 700 278   |