


KAMAR® Bruntfmesser


Es ist kein Rätsel, warum so oft die Brunst verfehlt wird. Oft geschieht sie nachts oder zwischen visuellen Beobachtungen. Durch die Benutzung der **KAMAR®** Bruntfmesser kann jedes Beobachtungsprogramm wirkungsvoller gestaltet werden. Wenn genau zur rechten Zeit festgestellt werden kann, daß die Kühe brunftig sind, dann erhöhen sich die Empfängnisziffern, das Zeitintervall zwischen dem Kalben verringert sich, und die Deckkosten nehmen ab.

Die **KAMAR** Bruntfmesser werden am Schwanzansatz der Kuh angeklebt. Wenn eine Kuh, die ein **KAMAR** trägt, von einem anderen Tier in der Herde bestiegen wird, verursacht der konstante Druck von der Brunst des bestiegenden Tieres, daß sich der Detektor rot färbt. Dies hinterläßt eine visuelle Anzeige, daß die Kuh still stand, um bestiegen zu werden, und somit wahrscheinlich brunftig und bereit ist, gedeckt zu werden. Auf andere Anzeichen der Brunst sollte weiterhin geachtet werden, um zu bestätigen, daß die Fortfärbung des **KAMAR** durch die Brunst verursacht wurde.

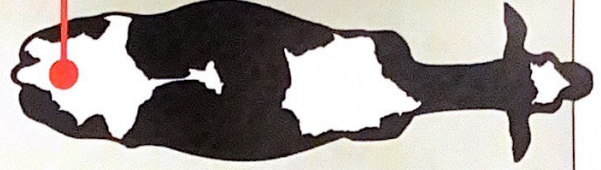

Die Forschung hat gezeigt, daß, wenn **KAMAR** Bruntfmesser zusätzlich zur visuellen Beobachtung benutzt werden, sich die mengenmäßige Feststellung der Brunst erhöht im Vergleich mit visuellen Beobachtungen allein. Dies geschieht einfach dadurch, daß es hilft, diejenigen Kühe zu identifizieren, die zwischen den visuellen Beobachtungspendenden brunftig waren. **KAMAR**-Meßgeräte liefern ein zusätzliches Anzeichen dafür, daß die Brunst eingeleitet ist, was dem Züchter einen wichtigen Vorteil zur Erhöhung des Wirkungsgrads seines Züchtens verschafft.

Jeder Detektor enthält einen exklusiven eingebauten Schrittmechanismus, der konstruiert wurde, um Zeitübermechanismen zu unterscheiden. Der Druck von Bestiegenen zu unterscheiden. Der Druck von der Färbungsmittel aus der Tübe, das die Kunststoffhülle knallrot färbt.

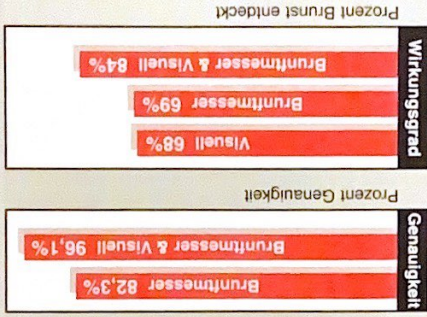

KAMAR®

(Hinweise und Anleitungen)

Endlich,
das fehlende
Glied zur
Feststellung
der Brunst!




Steamboat Springs, CO 80487
 US Fax 1-970-870-0461
 US Phone 1-970-879-2591
 Website www.kamarinc.com
 E-mail info@kamarinc.com

Gebrauch der KAMAR® Brunftmesser

Anwendungsmethoden:



- 1 Wenn nötig, die Stelle um den Schwanzansatz herum striegeln, um Schmutz und loses Haar zu entfernen. Überlanges Haar sollte auf normale Haarlänge zurückgeschnitten werden.

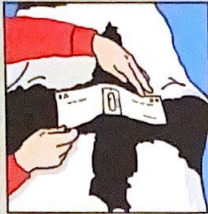

- 2 Das Meißgerät an der besten Stelle zwischen den Hüftknochen der Kuh anbringen. Wenn das Rückgrat uneben ist, sollte der Detektor so angebracht werden, daß der Pfeil zum Kopf hin und "bergauf" zeigt.



(Den Detektor an einer Stelle anbringen, wo er maximalen Druck von einem besteigenden Partnertier der Herde erhält)

- 3 Klebstoff an der vorbereiteten Stelle des Schwanzansatzes auftragen und mit dem Spachtel (oder einer alten Ohrblechmarke) tief in das Haar einreiben, um ein tiefes Eindringen zu gewährleisten. Dies ist sehr wichtig, um eine starke Grundlage für maximale Adhäsion zu schaffen.

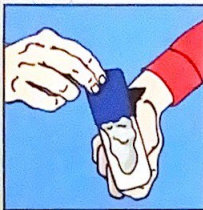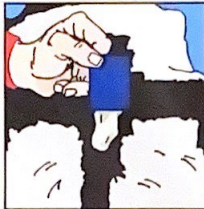


- 4 Eine dünne Schicht Klebstoff auf der Rückseite des Detektors auftragen und ebenmäßig verteilen. Zu viel Klebstoff kann die Klebfähigkeit des Detektors beeinträchtigen; das Auftragen von zu viel Klebstoff vermeiden.

- 5 Den Detektor mit dem Pfeil nach vorn zeigend auf die Kuh legen und fest den äußeren Stoffteil nach unten drücken. *(Eine Appliziervorrichtung wurde zu diesem Zweck mitgeliefert)*

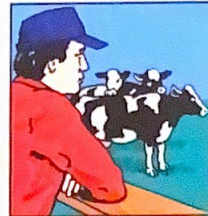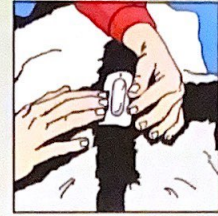

- 6 Die Kühe sorgfältig beobachten! Der Hauptvorteil von Kamar besteht darin, brunftige Kühe zu identifizieren, die zwischen den visuellen Beobachtungsperioden verfehlt werden.

- 7 Wenn möglich, dies durch andere Anzeichen der stehenden Brunst bestätigen. Die Rotanzeigen in Verbindung mit niedrigen Progesteronpegeln stellen ein sehr starkes Anzeichen für die Brunst dar.

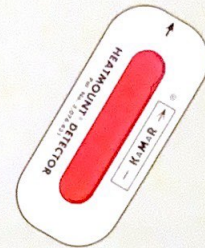

Anmerkung: Richtig angeklebte Detektoren können durch aggressives Verhalten bei der stehenden Brunst abgerieben werden. Kühe mit fehlenden Detektoren sollten stark verdächtig werden, daß sie in Brunst sind.

Kamar Brunftmesser sind am wirksamsten, wenn sie an einer kühlen, trockenen Stelle gelagert werden und vor dem Datum, das auf jedem Karton aufgestempelt ist, benutzt werden.

Weitere Hinweise:

- Sie können Ihre Detektoren mit Hilfe von Filzstiften mit einem Farbcode versehen, um bestimmte Gruppen zu identifizieren, wie z. B. Problemzuchttiere, Post-partum Brunften, Erstbegattungsbrunften, Zweitbegattungs-Wiederholungsbrunften.



- Es kann nützlich sein, die Identitätsnummern auf den Sockel jedes Brunftmessers zu schreiben. Wenn Sie einen nummerierten, verlorenen Brunftmesser finden (entfernt durch die Besteigung), kann es helfen, die brunftigen Kühe festzustellen.



- Es ist wichtig, Hindernisse zu entfernen, mit denen Kühe in Kontakt kommen und eine falsche Brunftanzeige verursachen könnten. Es ist ratsam, es nicht zu einer zu dichten Herde kommen zu lassen, und Hindernisse, wie tiefhängende Äste, Rücken-Kratzvorrichtungen, Viehölvorrichtungen etc. zu entfernen.



Manufactured by:

KAMAR®

Steamboat Springs, CO 80487
Manufactured in the U.S.A.

Vertrieb:

Macht jedes Brunftfestellprogramm wirksamer.

KAMAR® Das fehlende Glied zur besseren Feststellung der Brunst.