

MS BRULEUR DEPILATOIRE POUR MAMELLES



2809901



280 9900



**Schippers FRANCE Sarl
La Martinière - BP 10
35310 BREAL SOUS MONTFORT
Tel: 02 99 85 47 47
Fax: 02 99 85 47 48**

MODE D'EMPLOI (F)

Le MS Brûleur Dépilatoire pour mamelles ne sert qu'à enlever les longs poils autour des pis. Le Brûleur pour mamelles travaille en roussissant les poils avec une flamme à basse pression et en utilisant un mélange de gaz pauvre en oxygène.

Attention !

Le brûleur dépilatoire pour mamelles ne sert que pour enlever les poils longs, pas pour enlever les poils courts sur les côtés des mamelles.

L'UTILISATION

Il faut que les animaux soient fixés dans les cornadis avant de commencer à utiliser l'appareil. Le brûleur dépilatoire pour mamelles peut être réglé avec le bouton de réglage (A) pour obtenir une flamme de veille d'une hauteur d'environ 2 cm. La flamme de travail, réglée avec le bouton de réglage (B) a une hauteur de 20 cm. Le régulateur de pression (C) doit être mis dans sa position la plus basse.

Approchez le brûleur avec la flamme en veille entre les pattes arrières de l'animal. Sous les mamelles la flamme de travail est allumée. Il faut faire circuler le brûleur sous les mamelles d'un MOUVEMENT CONSTANT. Le sommet de la flamme va brûler les poils au fur et à mesure en quelques secondes.

Il est très important que la flamme bouge continuellement pour éviter de brûler les mamelles!!

Les résidus éventuels de poils roussis peuvent être enlevés à la main. S'il reste de longs poils sur les mamelles, il est important de répéter ce traitement.

Le MS brûleur dépilatoire de mamelles est muni d'une sécurité en cas de casse du tuyau(E) pour éviter la perte du gaz. S'il y a de brusques variations de pression il faut presser la poignée (D) pour assurer le bon apport de gaz.

En utilisant le brûleur dépilatoire, rappelez-vous que vous travaillez avec du feu et du gaz dans l'étable. Il est donc important de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter et prévenir les accidents.


Le brûleur dépilatoire pour mamelles peut être utilisé avec du gaz propane et avec du gaz butane.

Le Brûleur est constitué de:

- Régulateur de pression
 - Système de sécurité en cas de casse de tuyau
 - Tuyau de 4 mètres
 - Poignée à double fonction
 - Bâton brûleur
-

2809900 MS Brûleur Dépilatoire pour mamelles 8-4-2010

En raison du fonctionnement spécifique du MS Brûleur Dépilatoire pour mamelles la société Ms SCHIPPERS ne peut pas être tenue pour responsable d'un usage autre que celui décrit dans le mode d'emploi.

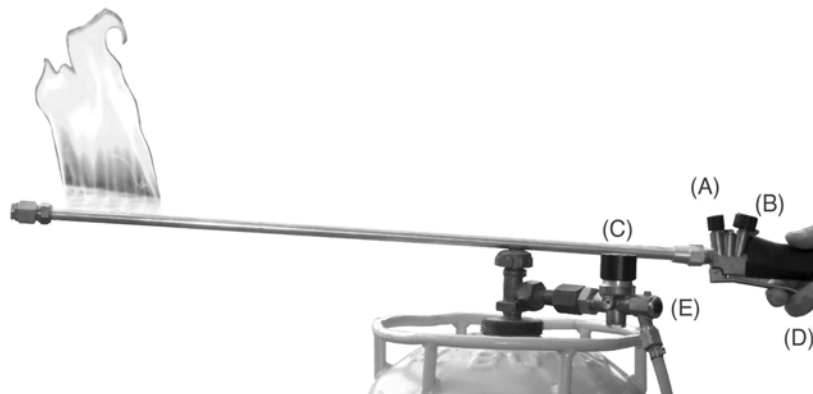

Comment remplir le réservoir ?

1. Installer la bouteille à gaz, dont on va prendre du gaz, à l'envers sur un support stable .
 2. Oter le capuchon de cette bouteille.
 3. Fixer l'embout sur la valve ; le réservoir à remplir doit être à la perpendiculaire (voir dessin)
 4. Ouvrir la valve et le bouton de purge du réservoir.
 5. Ouvrir la valve de la bouteille.
 6. Remplir le réservoir jusqu'à ce que du gaz liquide sorte du bouton de purge.
 7. Fermer la valve de la bouteille.
 8. Fermer le bouton de purge du réservoir après s'être assuré qu'il n'y a plus de gaz liquide à sortir.
 9. Fermer la valve du réservoir.
 10. Vérifier la fermeture complète des deux valves.
-

ATTENTION !

1. Du gaz s'échappe en remplissant le réservoir !

Dans un rayon de 3 mètres sont interdits :

- des feux ouverts
- fumer
- des trappes de caves

Travailler soit à l'extérieur soit dans un endroit bien ventilé (fenêtres et portes ouvertes).
Quand on travaille à l'intérieur, dans un endroit bien ventilé, seules les bouteilles à gaz d'une capacité maximale de 14 kg de poids de remplissage sont permises.

2. Ne jamais remplir le réservoir dans une cave !

3. N'utiliser que des embouts adaptés ! L'utilisation de tuyaux est interdite !

4. Réservoir sous pression ! Protéger du soleil et éviter une température ambiante supérieure à 50° C.

00—00—00—00—00--00