

1609932

MS Smartscan Wireless 1.0

Le Smartscan est un échographe fourni dans un coffret contenant une sonde sans fil, qui permet de communiquer par Wi-Fi avec la tablette fournie. La tablette peut être portée à l'avant-bras grâce au bracelet fourni. La lanière permet également de la porter autour du cou. Le système sans fil permet d'atteindre plus facilement les endroits difficiles d'accès. L'utilisation, grâce à la tablette, est simple et intuitive. L'appareil permet de figer l'image, de les enregistrer ou de faire des films.

Cet échographe ne peut être utilisé que pour contrôler la gestation.

1609931

MS Smartscan Wireless 2.0

Outre le contrôle de la gestation, la sonde peut également être utilisée pour mesurer l'épaisseur du lard dorsal.

1609930

MS Smartscan Wireless 3.0

Cet échographe dispose d'un module RFID, qui permet de scanner un transpondeur, afin d'enregistrer rapidement les données.



Caractéristiques	Sans fil 1.0	Sans fil 2.0	Sans fil 3.0
Fréquence 3,5 MHz	X	X	X
Contrôle de la profondeur réglable entre 100 et 160 mm	X	X	X
Amélioration de la résolution de l'image grâce à une bonne fréquence de la sonde	X	X	X
Images enregistrées au format JPG	X	X	X
Vidéo enregistrée au format MP4	X	X	X
Rapport de gestation au format PDF	X	X	X
Ciné-loop : 128 images max. (les ciné-loops enregistrés à des fréquences de trame élevées peuvent contenir davantage d'images)	X	X	X
3 heures en utilisation continue	X	X	X
ELD : mesure et enregistrement automatiques des données		X	X
Association du numéro d'identification de l'animal par lecture RFID de FDX ou HDX			X



Le câble ne risque plus de se casser. Livré complet dans un coffre solide, affichage clair à haute résolution.

Guide de démarrage rapide

1609930 Smartscan 3.0 (avec module RFID FDX et HDX)


1609931 Smartscan 2.0

1609932 Smartscan 1.0

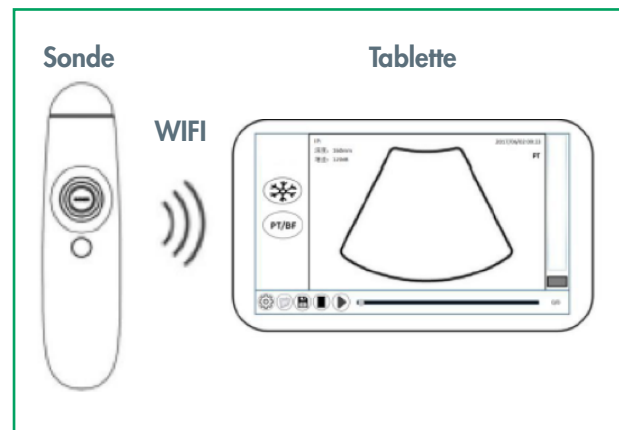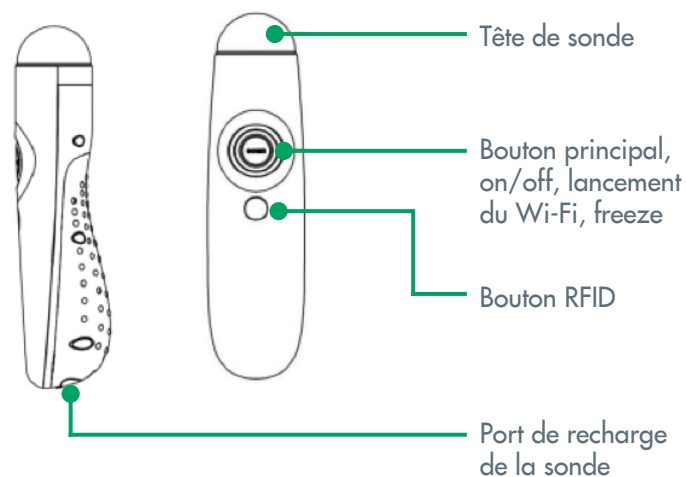


Lisez d'abord le mode d'emploi

Application Smartscan

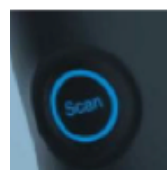


Appuyez sur le bouton principal et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes.

Un signal lumineux commence à clignoter. La sonde va automatiquement chercher un signal Wi-Fi actif.

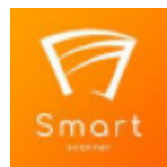

Ouvrez l'application Smartscan en appuyant sur cette icône.

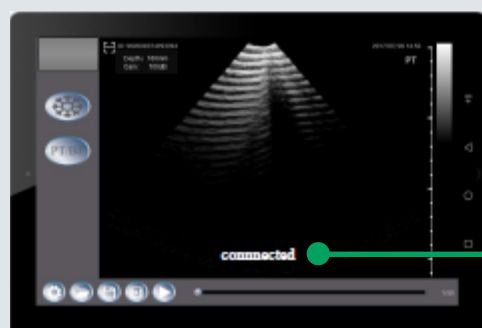

la tablette et la sonde sont synchronisées

Pressez la bouton principal de la sonde pour commencer à échographier